



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

組合式斜台 RK 2, 3

組合式斜台 - RK2,3

職員專用版本

01 器材介紹

1. 組合式斜台 - RK2



總寬度: 75 cm (3 塊)
總長度: 50cm
坡面長度: 37.5 cm
總高度: 3.6 - 9.1 cm
可承重: 200 kg

套裝配件	數量
斜板	9 塊
1/2 平磚	3 塊
平磚	3 塊
T 形鎖	18 粒
R 形鎖	10 粒
說明書	1 份

2. 組合式斜台 - RK3



總寬度: 75 cm (3 塊)
總長度: 75cm
坡面長度: 50 cm
總高度: 7.2 - 12.7 cm
可承重: 200 kg

套裝配件	數量
斜板	12 塊
1/2 平磚	6 塊
平磚	6 塊
T 形鎖	28 粒
R 形鎖	18 粒
說明書	1 份

02 使用說明



組合式斜台組件包括:

- 1/2 平磚
- 平磚
- 斜板

A. 所需工具

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 塑膠錘 | <input type="checkbox"/> 螺絲批 | <input type="checkbox"/> 手鋸 | <input type="checkbox"/> 小型電鑽 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|


B. 斜台的類型

- | | | |
|---|---|---|
| | | |
| <input type="checkbox"/> <u>1. 傳統型</u> - 社會上較常用的斜台類型，不配備休息平台。 | <input type="checkbox"/> <u>2. 休息平台型</u> - 備有休息平台，比較適合手動輪椅的使用者。 | <input type="checkbox"/> <u>3. 加長休息平台型</u> - 備有加長休息平台，比較適合需要稍作休息的輪椅使用者。 |

注意: 以上類型或需要多套板塊組成，同時亦需留意環境空間是否許可。


02 使用說明

C. 安裝前準備

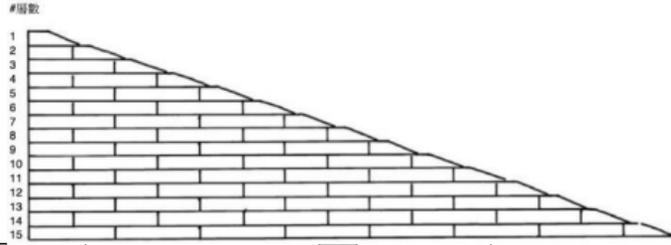

#層數	總高度 (英吋)	總長度(英吋)	#層數	總高度 (英吋)	總長度(英吋)
1	$\frac{3}{4}$	$5\frac{1}{2}$	12	9	$59\frac{1}{2}$
2	$1\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{4}$	13	$9\frac{3}{4}$	$64\frac{1}{2}$
3	$2\frac{1}{4}$	$15\frac{1}{4}$	14	$10\frac{1}{2}$	$69\frac{1}{2}$
4	3	$20\frac{1}{4}$	15	$11\frac{1}{4}$	$74\frac{1}{4}$
5	$3\frac{3}{4}$	25	16	12	$79\frac{1}{4}$
6	$4\frac{1}{2}$	30	17	$12\frac{3}{4}$	84
7	$5\frac{1}{4}$	35	18	$13\frac{1}{2}$	89
8	6	$39\frac{3}{4}$	19	$14\frac{1}{4}$	94
9	$6\frac{3}{4}$	$44\frac{3}{4}$	20	15	99
10	$7\frac{1}{2}$	$49\frac{3}{4}$	21	$15\frac{3}{4}$	$103\frac{3}{4}$
11	$8\frac{1}{4}$	$54\frac{1}{2}$			

D. 固定鎖使用方法

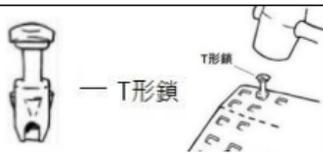

T 形鎖用以固定兩層平磚



R 形鎖則固定斜板傾斜部分的最外側
*注意:
! 斜板的角孔有兩面傾斜, 故不能使用
! 安裝時需確保 **R 形鎖**對應斜板斜度



C 形鎖從底部水平地牢固兩塊平磚
留意: 此款鎖粒屬可重覆使用。

(例):

1. 安裝前首先量度斜台所需的高度及長度
 2. 如高度是 $5\frac{3}{4}$ " , 則需要 8 層(即 6") , 並需切去最上層的上半部分 , 總長度則不變。
 3. 應先從最底層開始安裝 , 由下至上
 4. 即第 8 層開始 , 所需長度是 $39\frac{3}{4}$, 需要一塊 $\frac{1}{2}$ 平磚、三塊平磚、一塊斜板
 5. 第 7 層則需要三塊平磚、一塊斜板
 6. 用 **T 形鎖**及 **R 形鎖**把兩層板塊固定好
 7. 重複以上步驟 , 每新增一層便需用 **T 形鎖**及 **R 形鎖**把兩層固定
- 注意: 如需預先組裝 , 頂層應待到達現場才安裝 , 以獲得最適合尺寸成品。

(例):

1. 如遇到特殊環境 , 如有一小級的洗手間門檻時
2. 可先用平磚鋪滿洗手間至高於門檻的高度 , 再組裝合適高度的斜台
3. 用 **T 形鎖**及 **R 形鎖**把板塊固定好

03 安裝方法

	<ul style="list-style-type: none"> • 使用螺絲安裝 1. 先移除連接門階的隔板或其他物件，確保地面平坦 2. 組裝斜台至所需高度後，將其翻轉，底部向上 3. 把斜台放置於需安裝的位置，透過板塊的縫隙標記需要安裝螺絲的位置 4. 移開斜台，在已標記的位置用螺絲批將螺絲轉入，直至螺絲頭與門階剩餘大概 3mm 的空隙 5. 由上而下將斜台扣入螺絲，再確認已經穩妥沒有搖晃鬆脫才叫完成 <p>*注意: 如需安裝至金屬質料的門階，可將螺絲刀改用電鑽進行。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 使用防滑膠塞 (免鑽孔) 1. 安裝前先翻轉斜台底板，插入防滑膠塞於板塊底部 2. 確保地面平坦，然後根據所需位置放好斜台 3. 再用力壓實，確認斜台已經穩妥沒有搖晃鬆脫才叫完成 <p>*注意: 防滑膠塞的使用數量需因情況調整。</p>

04 注意事項

- 組合式斜台最大承重量為 200kg。
- 斜台由塑膠造成，輕巧易運送，方便輪椅使用者或其他有輔器材進出。
- 斜台由不同的膠磚組裝而成，可因應門檻或台階高度，組裝成不同的坡度及長度。
- 適用安裝於木地板、水泥、地磚或磁磚。

04 清潔及保養

- 組合式斜台均有防滑表面，加倍安全。
- 質料耐用，可於最高 100°C 或最低 -50°C 的環境下使用或清洗。
- 如需清潔，可使用家用清潔劑，用水沖洗後用乾布抹乾或竹待其自然風乾。

****實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動組合式斜台，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

🖨 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片

