


01 器材介紹

- 座廁起立輔助器可以協助下肢力量較弱或站立不穩的使用者，更安全地於座廁安坐或站立
- 輔助器高度分為三段，方便不同使用者的需要
- 扶手採用活動式設計，方便使用者轉移
- 無需鑽牆安裝，適合不同環境使用



02 使用方法

1. 坐下前，先把離較近身體一側的扶手掀起，方便使用者進出，待使用者坐穩後還原扶手

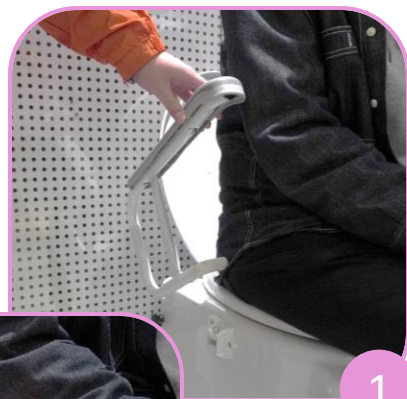

2. 再輕壓扶手，確保扶手已固定



3. 使用時便可以握着扶手借力起立或坐下



03 注意事項

1. 座廁起立輔助器的最大承重量為120 kg
2. 掀起扶手或使用時，應避免座廁週邊存放雜物，以免造成意外
3. 放下扶手或廁板時，要小心避免夾到身體各部位，以免受傷
4. 使用前，應先確保輔助器已穩固安裝於座廁板上
5. 使用前後，均需確保扶手已固定
6. 請勿將物品掛於扶手及連接支架上，以免影響操作
7. 如發現座廁板與座廁出現鬆脫狀況，請與中心職員聯絡
8. 座廁起立輔助器只可於如廁時使用，切勿用作其他用途



04 清潔及保養

- 清潔時，可使用清水擦拭，再用乾布抹乾
- 如發現頑固污漬，可配合中性清潔劑擦拭，再用乾布抹乾

****實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動座廁起立輔助器 NO，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心



3153 5252



3153 5250



ersc@ageathome.hk



新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片

