
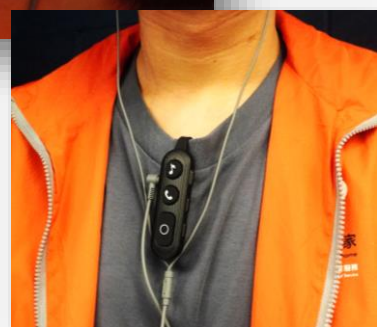


## 01 器材介紹


- 具備助聽功能，亦可支援接聽來電，維持日常生活
- 接收範圍廣闊，亦能提供聚焦降噪的效果，方便在不同環境使用
- 耳機採用介質傳導技術，減少耳朵長時間受壓的疲憊感
- 助聽器設定及操作簡易，易於不同人士使用
- 機身使用磁吸或掛帶設計，方便使用者隨身攜帶
- 充電兩小時，可持續使用接近12小時

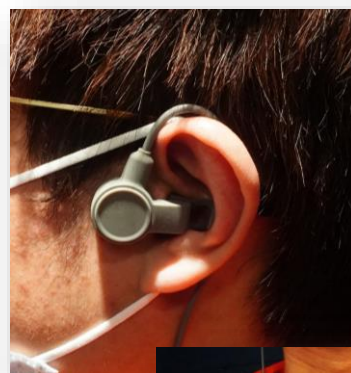

## 02 使用方法 助聽模式

### 開啟助聽器



1. 長按機身右側的開關鍵「」約3秒，機身正面會亮起綠燈，代表可以使用

2. 使用者可透過機身右側的「+」、「-」音量鍵，調整音量至清晰程度




如屬第一次使用，開機後，機身右側的提示燈會出現紅藍燈閃爍，如欲連接電子裝置使用，可參考以下切換模式。

### 藍牙連結功能


1. 如使用者希望專注於某項電子裝置上使用，可先開啟電子裝置的藍牙功能




2. 長按機身正面的音符「」按鈕，並於電子裝置的藍牙清單上配對「Dai3mimi」



3. 成功連接後，機身右側的提示燈會由紅藍燈閃爍轉為長亮藍燈

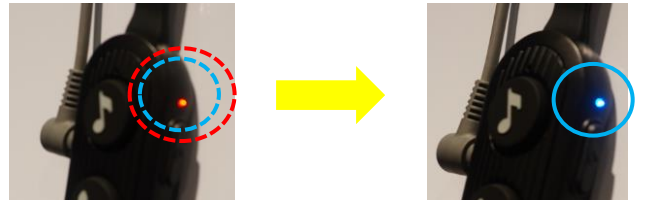

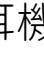4. 長按「」鍵，可切換至藍牙模式，耳機會自動轉為聚焦降噪模式


5. 使用者同樣可透過機身右側的「+」、「-」音量鍵，調整音量至可清晰程度




當第一次成功連接後，耳機會於下次開啟時自動搜尋並連接已配對過的電子裝置。如需重新連接其他電子裝置，只需按照第一次連接的方法即可。

## 02 使用方法 助聽模式

### 來電接聽功能

1. 成功連接電子裝置的藍牙功能後
2. 如有來電，電話鈴聲會從耳機中播出
3. 接聽或掛斷來電，只需按下機身正面的接聽鍵「」即可

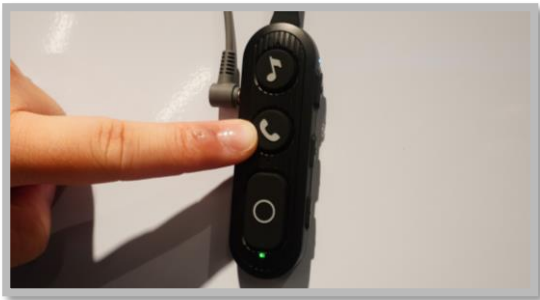


4. 建議使用者將電話的來電提示音調至最大，不要把電子裝置調較至靜音模式




 來電掛斷功能只限於已接聽的來電，並不能用作掛斷未接聽的來電使用。


### 充電方法

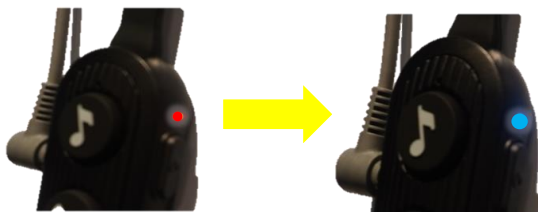


1. 機身左側會有充電口，接上已配備的USB充電線即可
2. 充電時，**紅色指示燈**會亮起；充電完成後，**指示燈會轉為藍色**，代表已充好電
3. 充滿電後，最多可使用大約12小時，建議每日充電，確保不影響日常使用

## 03 注意事項

1. 如按住電源開關鍵「○」後指示燈仍沒有亮起時，代表助聽器可能電量不足，需為助聽器充電 
2. 耳機配戴不穩，過鬆或過緊，請通知中心職員協助
3. 環境聲音過大，助聽器音量過大，可先按降低音量鍵「-」再調整音量至清楚程度，有助改善情況
4. 請勿大力拉扯耳機，以免造成損壞

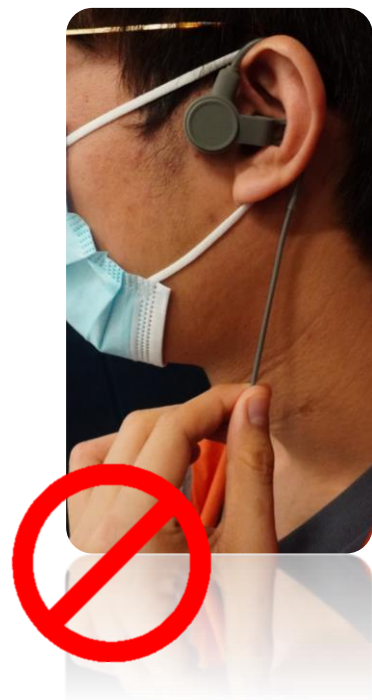

## 04 清潔及保養

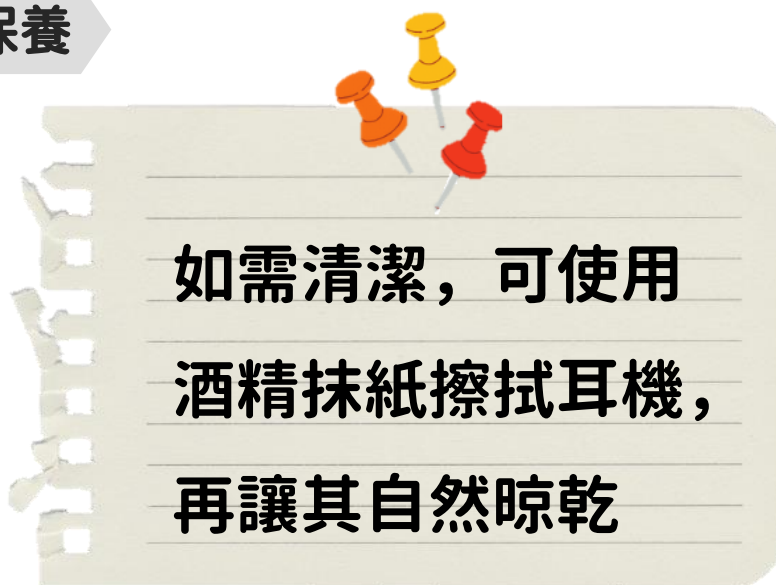

**\*\*實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動助聽器 DM，如有疑問，請向中心職員查詢\*\***

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

 3153 5252  3153 5250

 [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖