



01 器材介紹

- 具備助聽功能，支援接聽電話、聽歌、收音機和看電視等，維持日常生活
- 可因應用家聽力情況作出補償，減噪及收音更清晰
- 接收範圍寬廣，令使用者可以有更適合的視聽距離
- 充滿電後，助聽功能可持續維持10小時
- 器材採用頸部環繞式設計，減少耳朵長時間受重的疲憊感

02 使用說明

控制界面



03 使用方法

助聽模式

**開啟助聽器**

1. 長按住電源開關鍵「○」約3秒，直至紫色指示燈亮起，同時耳筒會發出提示音
2. 按住模式轉換鍵約3秒，即可切換至助聽模式

關閉助聽器

長按住電源開關鍵「○」約4秒，直至紫色指示燈熄滅

調整音量

1. 按提高音量鍵+ 或 降低音量鍵- 逐級別調整音量
2. 音量分為0 - 15級，當調整至最高級別會響起「嗶嗶」提示音，而最低級別則響起「嗶」提示音

**切換模式**

當助聽器於助聽模式時，按住模式轉換鍵約3秒，即由助聽模式切換至藍牙模式。

如需切換回助聽模式可重復進行以上操作。

*如無法切換模式，請與中心職員聯絡



03 使用方法

藍牙模式

藍牙模式連接智能裝置後，可以接聽來電及播放音頻


藍牙配對

1. 開啟助聽器後，耳機上的指示燈會開始紅藍色交替閃爍
2. 啟動智能裝置的藍牙功能，在藍牙搜尋清單上點選該主機編號「Heari A0 xxxxxx」進行配對。

*主機編號已貼於機身其中一側

藍牙

藍牙

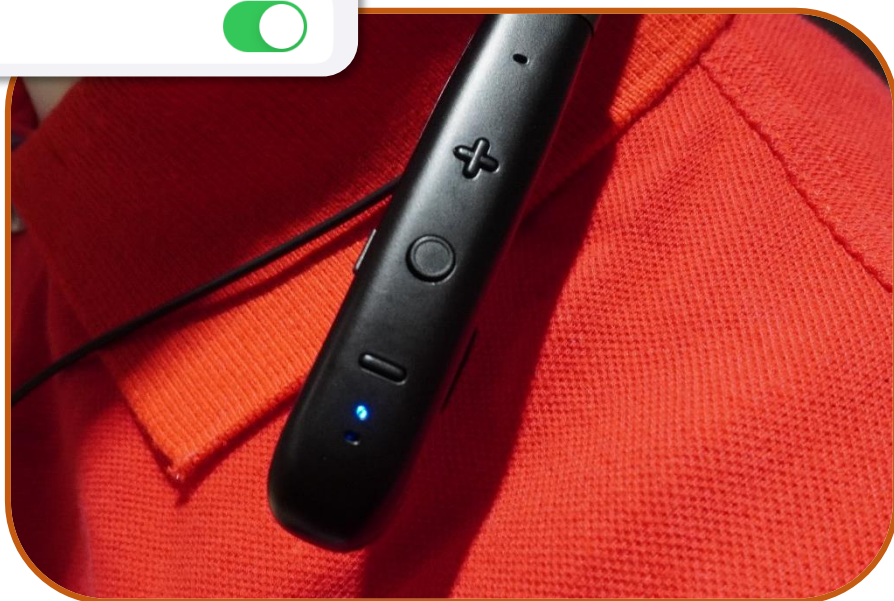

耳機上的指示燈閃爍至藍色表示完成藍牙配對

- 若已成功完成藍牙配對，每次開啟助聽器及藍牙裝置時，助聽器便會與藍牙裝置自動連接。
- 成功連接後，藍色指示燈開始閃爍，並進入藍牙模式。

03 使用方法

藍牙模式

接聽來電



1. 如有來電，耳機鈴聲會從耳機中播出
2. 按一下電源開關鍵「○」接聽來電
3. 按住電源開關鍵「○」直至響起「嗶」提示音結束通話

播放音頻



按一下電源開關鍵「○」，可暫停或恢復音樂播放
音量可透過提高音量鍵「+」或降低音量鍵「-」進行調整

助聽器充電

1. 打開USB充電口的防塵蓋，插上USB連接線
2. 充電時，紅色指示燈會長亮
3. 充電完成後，指示燈會轉為藍色

充滿電所需的時間約
2.5小時



05 注意事項

1. 助聽器開啟後沒有聲音，助聽器可能尚未轉換至助聽模式，所以需按住模式轉換鍵約3秒
2. 如果按住電源開關鍵「○」約3秒後指示燈沒有亮起時，即代表助聽器電量不足，需為助聽器充電
3. 耳機過鬆或方向錯誤，請更換合適耳塞，把耳機放進耳道後輕輕轉動，耳機線向下
4. 環境聲音過大，助聽器音量過大，按降低音量鍵- 調整音量至能聽清楚人聲程度有助改善情況
5. 使用時，請勿大力拉扯耳機



06 清潔及保養

1. 如需清潔，可使用中性清潔劑擦拭耳機，再用乾布抹乾
2. 擦拭時不要用力拉扯，避免令耳機出現損壞

07 其他配件

此助聽器 HA 可配合無線助聽咪高峰 HM 使用，如有任何查詢或了解其使用方法，可聯絡中心職員。



****實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動助聽器 HA，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

☎ 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖