



賽馬會家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心

Gerontech Education and Rental Service Centre

無線助聽咪高峰

- HM

無線助聽咪高峰 - HM




01 器材介紹

- ▶ 無線助聽咪高峰設有兩種收音模式，全向或固定方向，兩者均可令環境聲音更集中，適用於高噪音的環境
- ▶ 收音範圍廣闊，可接收近十米內的聲音
- ▶ 更可接駁咪高峰，令談話內容更清晰
- ▶ 機身主體背面設有固定夾可夾於衣服位置，方便攜帶
充電後可持續使用近20小時

02 使用說明

控制界面

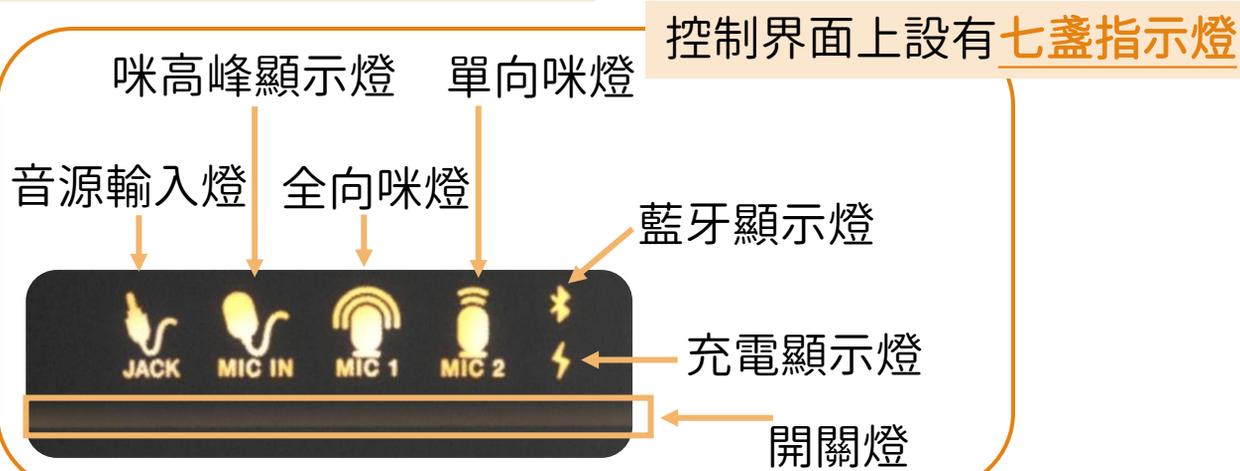

控制界面亦設有 **三個按鈕**、**三個插孔**

音源線插入孔

外置咪插入孔

充電孔



02 使用說明

開關方法

- 長按開關鍵即可開啟咪高峰主機，開關燈會像直線般亮起
- 同樣長按開關鍵，開關燈熄滅代表已經關機或需要充電



充電方法

只需使用已提供的充電線，插入主機前方的「TYPE C」充電孔即可



03 使用方法

配對助聽器



確保助聽器已經開啟，再長按咪高峰的開關鍵啟動主機。全向咪燈會亮起，而藍牙顯示燈會開始閃爍。

將兩者放於附近位置以便進行連結，再長按助聽器的藍牙連接按鈕。



配對時，助聽器的藍牙顯示燈會紅藍色交替閃爍。成功連結後，咪高峰的藍牙顯示燈會閃爍得較緩慢，而助聽器的藍牙燈亦會變為藍色，即可開始使用。



03 使用方法

使用咪高峰



先確保咪高峰已成功連結助聽器。
主機左側設有模式轉換鈕，可切
換全向或單向收音。

直接把主機放於需要接收的裝置發
聲位旁，咪高峰會預設透過全向模
式接收聲音再傳輸至助聽器。



“如欲採用單向模式”

按一下主機左側的轉換按鈕，「M I C 2」單向咪燈便會亮起



“透過連接線傳輸”

可利用連接線插入發聲裝置及咪高峰的音源線插孔
界面上的「J A C K」音源輸入燈會亮起代表開始接收
同樣將咪高峰主機放於需要接收的裝置發聲位旁即可



03 使用方法

使用咪高峰



透過外置咪傳輸

可先插入外置咪於咪高峰前方的外置咪插孔
 界面上的「MIC IN」咪高峰顯示燈亮起代表開始接收
 同樣將咪高峰主機放於需要接收的裝置發聲位旁即可



04 清潔及保養

- 建議每次使用後，均可用酒精抹紙清潔耳筒位置，確保衛生
- 存放時，切勿擺放於高處、潮濕、長期曝曬的地方，以免損壞

05 附屬配件

此無線助聽咪高峰 HM 需配合助聽器 HZ 及 HA 使用，如有任何查詢或了解其使用方法，可聯絡中心職員。



****實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動無線助聽咪高峰 HM，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252 🖨 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖