




01 器材介紹

- 具備助聽功能，糾正及改善聽力，維持日常生活
- 當聲音傳入助聽器時，機身裡的芯片會自行調整合適的頻率
- 專為老年失聰或聽力損失人士設計
- 體積輕巧細小，方便使用者隨身攜帶，可隱藏於耳背位置


02 使用說明

控制界面

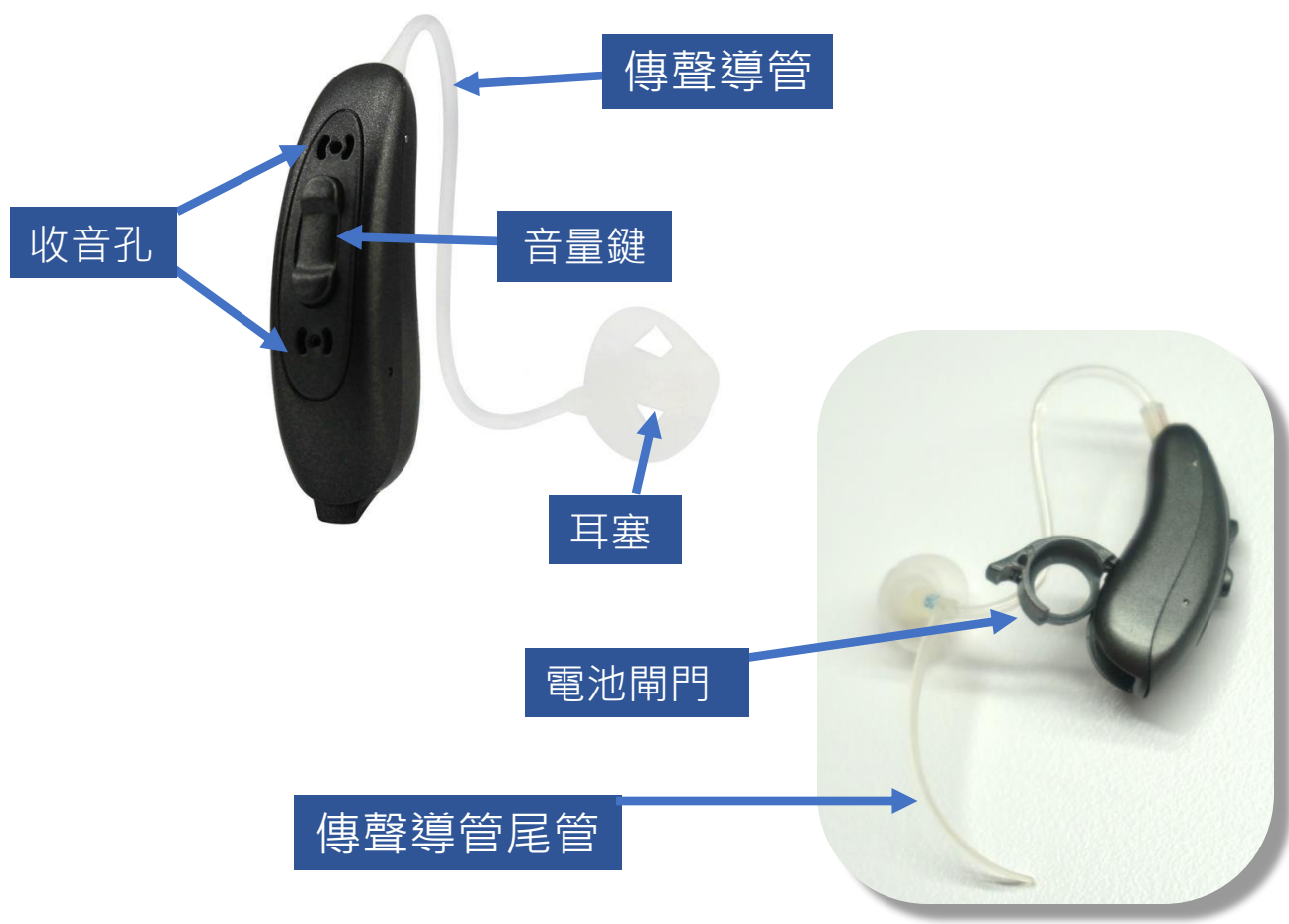

02 使用說明

更換電池

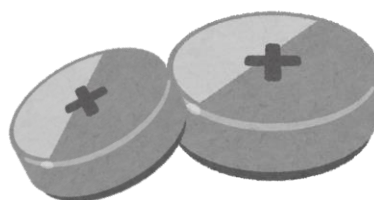電池嵌入方法:

1. 拉開機身上的電池閘門



2. 未使用的電池上會有一塊膠貼，放置電池時膠貼朝上



3. 放好電池後，檢查電池是否「+」號向上，然後再撕掉膠貼



4. 最後蓋回電池閘門，助聽器會發出「嗶」一聲的提示音，表示可以使用



電量不足時，助聽器會發出「嗶、嗶」的提示音，屆時請更換電池。(電池型號為：312)

電池使用貼士

由於助聽器內部不能接觸水份，故準備更換新電池時，盡量避免用手直接觸碰，建議使用配備的磁石貼安裝會比較理想，放置好電池後，再移除電池上的膠貼。



03 使用方法

佩戴方法

1. 先將音量調到最低，再把耳塞放進耳道後緩緩向內轉動
2. 輕輕拉起耳機，將機身放置於耳後
3. 再一下一下地調高音量，直至清晰程度
4. 調整音量時，助聽器會發出「嗶」一聲的提示音，當調整至最低級別或最高級別會響起「嗶嗶」兩聲的提示音



*如發現耳機過鬆或過緊，請與中心職員聯絡。


04 注意事項

- 配戴助聽器後沒有聲音，可先檢查電池是否安裝正確或沒電。如安裝正確，可長按音量鍵約3秒嘗試重新設置
- 如發現耳機過鬆或配戴出現困難，請與中心職員聯絡，切勿強行拉扯耳機或導管
- 助聽器設有四個不同程度的收音模式，如有需要可向中心職員查詢
- 配戴時，避免手指或其他物件觸摸耳機收音位置，以免影響效用



05 清潔及保養

- 如發現耳機上有**污垢**，請使用隨機附帶的清潔刷輕刷污垢，切勿使用尖銳物品移除**污垢**，避免損壞耳機。
- 可用酒精或中性清潔劑擦拭耳機電線及耳塞上的**污垢**，再用乾布抹乾。擦拭時不要太過用力拉扯，避免令耳機出現損壞。

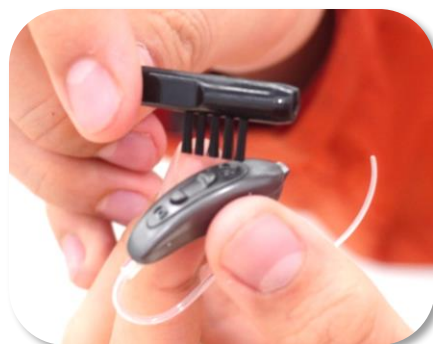

****實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動助聽器 LV，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

🖨 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖