



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

助聽器-KT

助聽器-KT



01 器材介紹

- 支援助聽、接聽電話和聆聽音樂
- 可因應使用者情況作出調整，減少噪音令使用者聽得更清晰
- 助聽器設定及操作簡易，方便不同人士使用
- 充滿電的情況下，可持續使用約12小時
- 掛頸式設計，方便使用者隨身攜帶，減少頸部受壓

02 使用說明

控制界面



02 使用說明

指示燈說明

- 沒有亮起就表示是關機和充電完成
- 綠色燈就表示是已開機狀態
- 閃爍中的藍燈就表示連接了藍牙的狀態
- 閃爍中的紅燈是充電中的狀態，紅燈長亮則代表低電量，需要馬上充電



02 使用說明

調整音量



可調整音量

最小音量為「1」

最大音量為「16」

- 每次按音量鍵「+」或「-」，都有「音量是 " 1~16 "」的語音提醒，可按需要調節到適合的音量

03 使用方法

助聽模式

長按機身右側的開關鍵約3秒，指示燈狀態亮綠燈或聽到「開機」的語音提醒，便可以立即使用

1. 自聲消除模式
可減少自己說話聲
量過大的情況



2. 全方位模式
保持周圍環境的
聲音


3. 聚焦模式
專注眼前的聲音，
專為一對一對話
而設

03 使用方法

藍牙連結功能



1. 開啟助聽器後，開啟名字為「音唄」的應用程式，在應用程式的右上角點選連接藍牙
2. 然後點選「音唄_Kitele2」，進行連接
3. 成功連接後，藍燈會持續閃爍
4. 助聽器與連接裝置需要保持近距離，長按機身左側的音量鍵「-」，聽到「配對模式」的語音提醒後，便成功連接藍牙

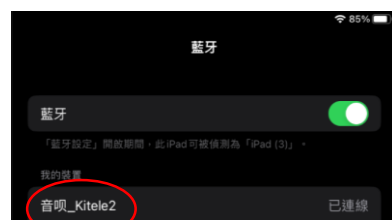

04 注意事項

- ◆ 助聽器開啟後沒有聲音，檢查指示燈狀態，確認電力是否足夠
- ◆ 助聽器配戴不穩，過鬆或過緊，請與中心職員聯絡
- ◆ 請勿大力拉扯耳機，以免造成損壞



05 清潔及保養

- ◆ 可用酒精或中性清潔劑擦拭耳機電線及耳塞上的污垢，再用乾布抹乾
- ◆ 擦拭時不要用力拉扯，避免令耳機出現損壞

實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動助聽器 KT，如有疑問，請向中心職員查詢

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心



3153 5252



3153 5250



ersc@ageathome.hk



新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號舖