

動力手臂



01 器材介紹



- 透過彈簧補償系統承托手臂的重量，可協助上肢肌肉力量有限者較容易移動手臂，以進行日常活動。
- 動力手臂的彈簧張力可調校，以提供合適的力度，配合使用者需要。

02 器材結構



03 安裝方法

安裝動力手臂

器材安裝的位置已由職業治療師評估，並不建議使用者自行修理及拆除器材。如果器材因為意外而導致鬆動，請按照中心職員建議的位置，使用以下方法安裝器材：



1

固定工作台夾

- 把 C 型工作台夾的凹位推入枱邊，直至推至最入



2

- 逆時針方向轉動固定鎖以固定工作台夾，直至固定鎖末端的黑色膠塊緊貼枱底；順時針方向轉動則可鬆開

請確保工作台夾已穩妥固定才開始使用

確保動力手臂已穩妥組裝

- 請在每次安裝後及定期檢查以下位置的金屬扣件有否完全穿過連接杆：



位置一：工作台夾上



位置二：動力手臂底部

動力手臂的承托力度

如果因為意外而導致動力手臂的承托力度改變，或使用者認為器材的承托力度不足，請聯絡中心職員。
切勿自行改動，以免影響器材效能。



固定動力手臂

- 使用後及閒置時，請把固定環套入工作台夾的固定掛鉤中

04 使用方法



- 1 請按照職業治療師建議的位置坐下
- 2 使用者可以自己或在照顧者協助下把前臂放在前臂支撐架上，上臂則緊靠上臂支撐架

- 如有需要，可屈曲上臂支撐架以調校其鬆緊度，讓其緊貼上臂



- 3 另一隻手從工作台夾的固定掛鉤取出固定環，然後慢慢打開動力手臂，以免動力手臂突然向上彈起



- 4 確保手肘可以自由活動，及動力手臂移動時沒有受到不必要的物件阻擋後，才開始使用動力手臂向各個方向移動



取出手臂

- 使用後，使用者可以自己或在照顧者協助下把固定環套入工作台夾的固定掛鉤中，然後取出手臂

05 注意事項



1

1 使用時應避免取出手臂，以免發生意外。

2 當動力手臂位於下方位置時，請小心彈簧補償系統所產生的回彈力，以免造成意外。

3 請勿把手指或物品放在動力手臂接駁位置之間的空隙，以免發生意外及影響運作。

4 請勿將物品掛在動力手臂上。



4

5 器材安裝的尺寸、設定及位置均已由職業治療師評估，使用者切勿自行改動，以免影響操作。如發現器材有問題，請與中心職員聯絡。



3

06 清潔及保養

✓ 如需清潔，請使用溫水和中性清潔劑，擰乾毛巾水分後才擦拭。

✗ 請勿使用酒精消毒。

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動動力手臂。如有疑問，請向中心職員查詢。

賽馬會 a 家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

📄 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號舖

觀看說明影片

