




賽馬會a家  
Jockey Club | age at home  
樂齡科技教育及租賃服務  
Gerontechnology Education and Rental Services

# 特別功能輪椅 (加倍安全)



## 01 器材介紹

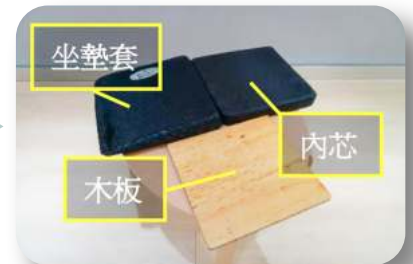

## 02 使用方法 輪椅打開方法

1



先用鎖車掣  
鎖定輪椅

2



到輪椅前方，  
按下車架銀  
色內框，令  
腳踏板升起

3




拉高感應帶，確保沒有勾住任何物件。  
同時手掌用力將交叉折疊桿向下壓以打開輪椅

按下時，請注意手指擺位，  
以免夾傷

4



提起感應帶，將座架平放車架內框

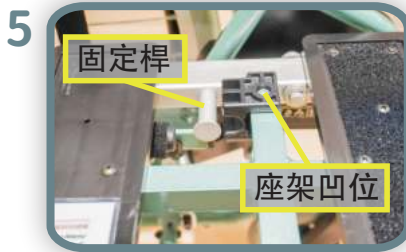

5 放置時魔術貼要朝上，座架四角凹位需對準車架內框四根固定桿擺放



6 捏住座架前方的提拉桿將座架推入，座架凹位需完全套入固定桿



7 坐墊及座架魔術貼對準位置貼好，確保坐墊放置在感應帶上

## 注意



確保坐墊擺放正確：印有文字面朝上並貼近椅背位置



坐墊必須放置在感應帶上，才能發揮安全設計之功能



請確保感應帶沒有勾住任何部件，否則有機會造成損壞



請勿將手握車架內框向下壓，否則有機會夾手

## 輪椅的折疊方法



1. 收起腳踏板

4. 用力將黑色掛繩向上帶

2. 拆走專用坐墊

5. 摺疊椅背

3. 將座架拆走

6. 完成折疊

基本上折疊輪椅的方式剛好與打開時完全相反

## 注意



輪椅折疊後，專用坐墊及座架可平放於輪椅扶手上，勿垂直放置於兩邊扶手中間，以免配件卡在車架內



## 椅背摺疊及打開說明

特別功能輪椅 (加倍安全)<sup>KN</sup>



將椅背後的手柄  
向上拉至最盡，  
聽到「咔」一聲，  
代表手柄已經完  
全打開並鎖好



相反，一手按實  
手柄後方凸出的  
黑色按鈕，另一  
隻手把手柄向後  
拉至最盡，即完  
成椅背摺疊

注意：打開輪椅時請確保椅背**完全打開**並且鎖好

## 安全帶使用方法



輪椅另設有外置  
安全帶。當使用  
者坐貼椅背後，  
請繫上安全帶



把安全帶穿過兩  
邊扶手，環繞腰  
腹及椅背，扣上  
並調較鬆緊度

安全帶應緊貼身體，  
大約**留有一個手掌**的空間便可

安全帶腰包置  
於使用者腹前

## 03 特別功能

### 輪椅安全系統



當使用者突然離開輪椅，  
鎖車掣會**自動向後移**並鎖緊輪椅

啓動自動鎖車後而使用者未有返回輪椅時，鎖車掣會變得更需要用力解鎖。解鎖時，會發出「啪」一聲脆響，提示自動鎖車已經解除



當使用者身體處於前傾狀態，或雙腳站立於腳踏板上時，腳踏板會因使用者的身體重量而降落到地面，以減低跌倒風險

- ❖ 使用前，請確保坐墊已經放置在感應帶上
- ❖ 乘坐時，請確保使用者已經坐貼椅背，以便啓動輪椅安全系統

## 04 注意事項 使用輪椅時



- ❖ 上落輪椅前請先摺起腳踏板 (如右圖所示)
- ❖ 輪椅行走時如發現有異常聲響或震動，請立即停止使用

## 其他注意事項

- ❖ 輪椅最低體重要求為 40kg，如使用者體重過輕，有機會未能啓動安全鎖車系統
- ❖ 輪椅最大承重量為 100kg

## 05 清潔及保養

- ❖ 輪椅及專用坐墊可使用中性清潔劑清潔，再用柔軟乾布抹乾
- ❖ 如需進行消毒，可用消毒酒精
- ❖ 請將椅背墊的魔術貼部分收好，再放入洗衣袋進行清潔
- ❖ 專用坐墊只有**坐墊套**可水洗之後自然風乾，**內芯**及**木板**部分只可用乾布擦抹

\*\*實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能輪椅，如有疑問，請向中心職員查詢\*\*

## 06 聯絡資訊

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252      📠 3153 5250

✉ [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號鋪

觀看說明影片

