




賽馬會家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

特別功能輪椅 (高背傾斜) - KM

01 器材介紹

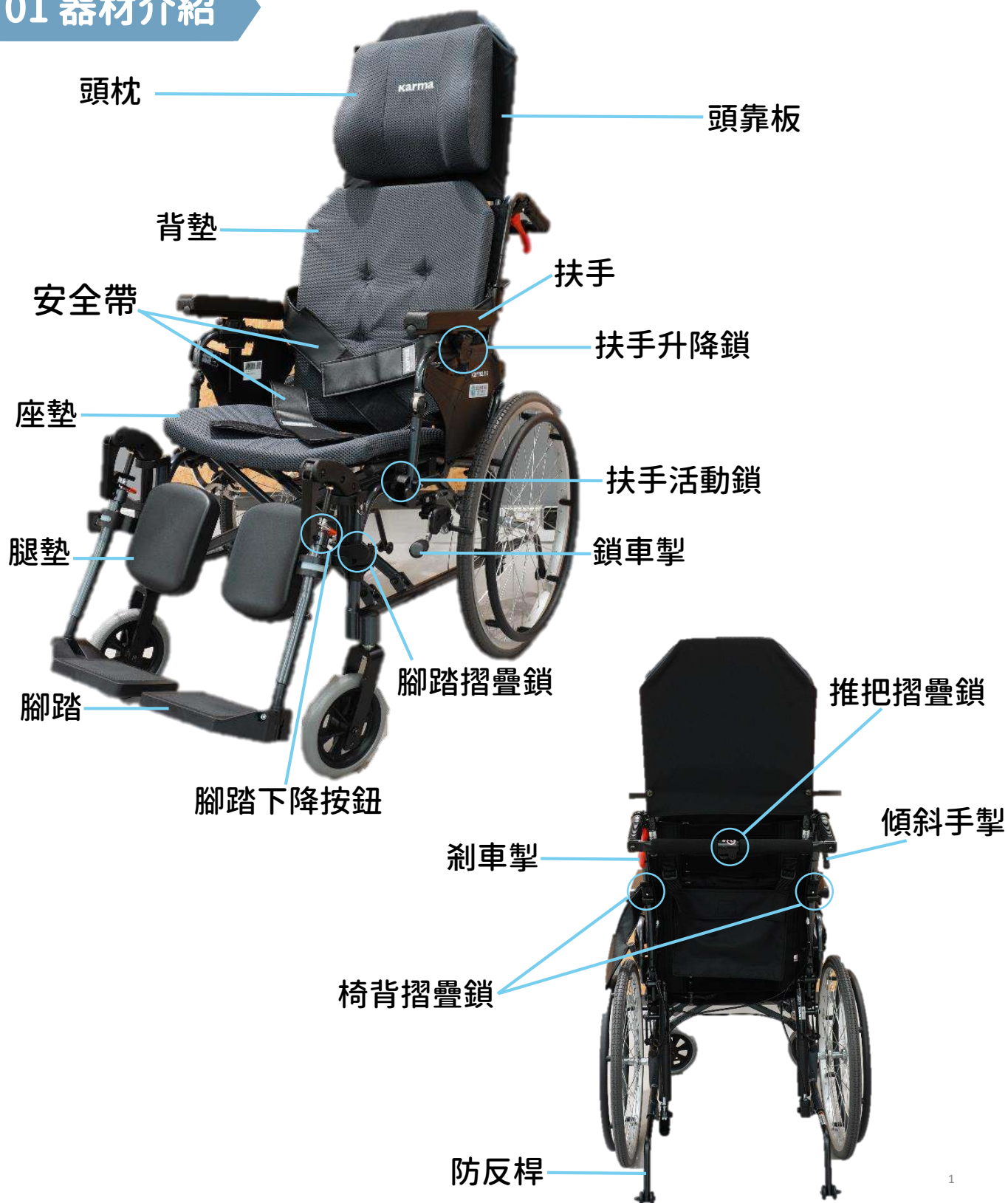

01 器材介紹

- 輪椅採用活動式扶手及腳部承托，背墊及腳墊傾斜度均可調較，方便轉移和配合不同身高人士需要
- 頭枕設計可分散肩頸壓力，提高更大保護及支撐
- 座椅具有防潛滑結構，可有助穩定坐姿
- 後躺連動設計能配合後傾姿勢，讓髖關節與輪椅保持一致性，令使用者更安全舒適
- 設有橫向式推把，減輕照顧者壓力
- 輪椅體積較為窄身亦可摺疊，方便收納及於狹窄空間使用

02 使用說明

剎車掣

- 設於左邊手柄下方
- 如需減速，可握著左邊紅色的剎車掣，鬆手則可解除



安全帶

- 座椅腹前及胸下均設有安全帶，安全帶與身體之間，留有一隻手掌左右的空間即可




! 未繫上的安全帶可能會被捲進車輪而引致意外，故務必繫上安全帶

02 使用說明

扶手

解除扶手

- 按下扶手活動鎖，再向後提起扶手
- 還原時，當活動鎖發出「咔」一聲，代表扶手已鎖定

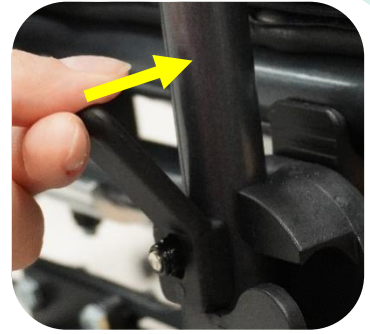

調較扶手高度



1. 向上剔起扶手旁的扶手升降鎖



2. 然後上下移動扶手至合適位置



3. 再將升降鎖向下按回即可

椅墊及背墊

- 椅背和坐墊均利用魔術貼帶固定，易於調校背部和臀部的承托位置



! 魔術貼的鬆緊度已經由專業人士評估及調校，如有不適請與中心職員聯絡。

02 使用說明

摺疊輪椅



1 先鎖定輪椅，收起腿墊及腳踏



2 按住腳踏摺疊鎖向外撥，再提起以拆卸腳部承托



3 扭鬆手掣下方的兩個旋鈕，卸下頭靠板



4 再拉走背墊和座墊



5 拉動摺疊鎖的拉桿，雙手將橫向推把向上拉



6 輕按兩邊的椅背摺疊鎖，將椅背往下收納



7 站在輪椅一側，雙手前後捉住實坐墊，向上提起



8 盡量將兩邊扶手往內拍好，為之完成



開啟輪椅只需按照摺疊的步驟次序相反即可

03 使用方法



1 鎖定輪椅，進行傾斜前要向使用者示意，先調整腳部承托部份



2 直接用手向上抬，即可調較腳托部份的高度




3 一隻手握實傾斜手掣，另一隻手托穩椅背



4 緩慢地向後傾斜至理想的角



5 還原時，一隻手需握實傾斜手掣，另一隻手緊握推把，再緩慢地將椅背向上推

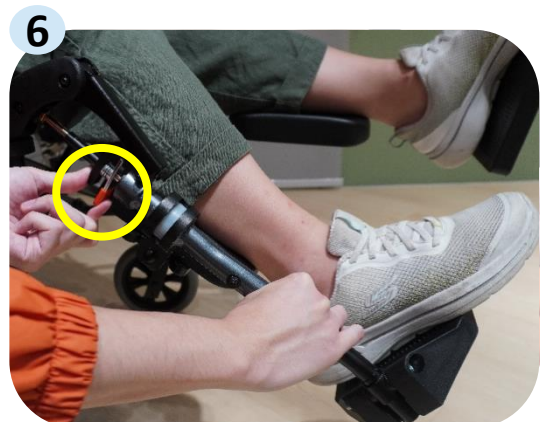

6 最後，按住腳踏下降按鈕，將腳托支架向下還原即可

03 注意事項

- 輪椅最大的承重量為**115kg**
- 使用輪椅時切勿將重心向前傾，避免翻倒造成危險
- 應避免在凹凸不平的地面下使用
- 離開或進行傾斜前，請確保已鎖定輪椅
- 如長時間閒置，使用前請先檢查輪椅配件或剎車系統等有否破損，以免影響操作
- 如推動輪椅時有異常聲響或震動，請立即停止使用並通知中心職員
- 此輪椅只可作行動輔助用途，請勿當作其他運輸器材使用



04 清潔及保養

- 可使用已扭乾水的濕布進行清潔
- 如有頑固污跡，可使用中性清潔劑配合海綿或柔軟的刷子擦拭，再用水沖洗然後抹乾
- 請勿使用其他清潔劑、酒精或天拿水等溶劑進行清潔
- 請避免存放於潮濕、長期曝曬或接近火源的地方

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能輪椅(高背傾斜)-KM，如有疑問，請向中心職員查詢

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

🖨 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片

