

電動助推輪椅-YP

01 器材介紹

右扶手(電池擺放位置)



腳踏

手把及剎車系統



操作指示燈



故障燈

車匙孔



左扶手(充電線擺放位置)

防傾桿


後傾桿

- 具有手推及電動助推兩個功能，電動助推可減輕照顧者推動輪椅時的身體負擔，減低受傷風險
- 操作簡易，只需插入車匙並按下手柄按鈕便可使用電動助推模式
- 安全感應系統會於輪椅上未有使用者時啟動，電動助力會停止，屆時亦會出現提示
- 處於轉彎位置時，電動助推模式亦可提供動力轉向
- 輪椅具有自動鎖車功能，放開手柄時，輪椅會自動停下及鎖定
- 輪椅體積輕巧亦可摺疊，方便存放

02 使用說明 開合輪椅

摺疊車身

1. 先確保已經關上電源
2. 站於輪椅旁邊其中一側，雙手前後握住座面中間位置向上拉
3. 然後按下椅背扶手兩邊的調較掣，將兩邊扶手向下擺放
4. 再套好輪椅底架中間的固定桿
5. 最後將兩邊腳踏收起，再向座位上方摺起收納

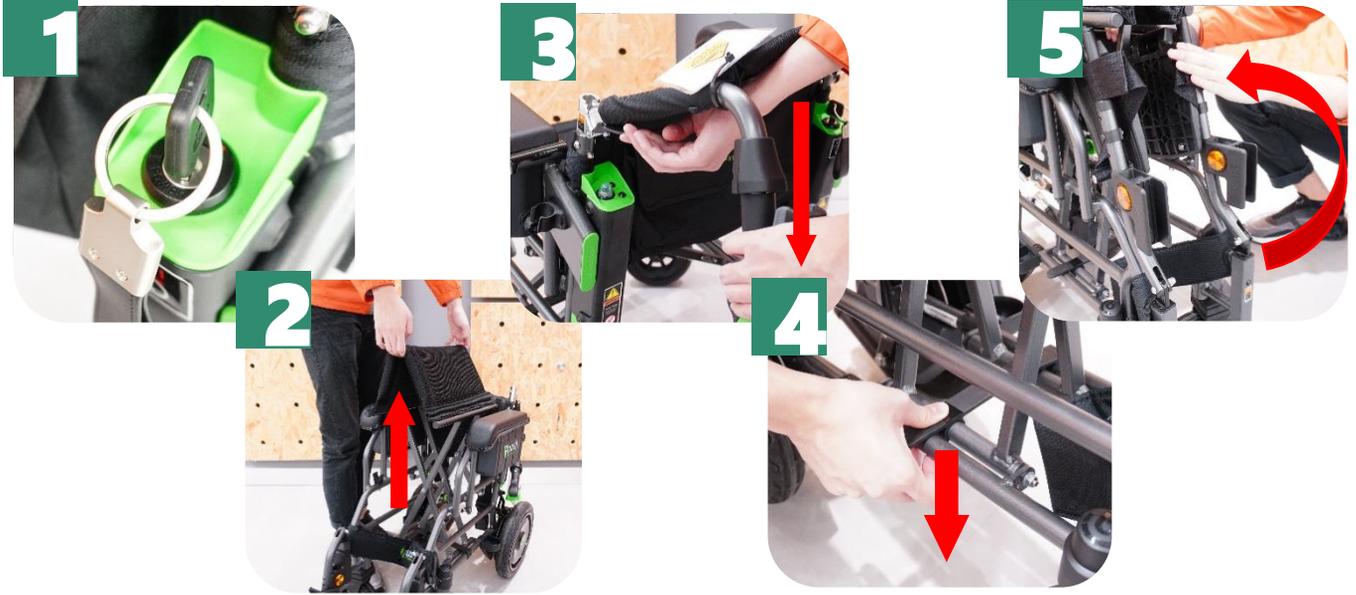

敞開車身

1. 相反，先將兩邊腳踏放下
2. 然後解除輪椅底架的固定桿
3. 稍為拉開兩邊扶手，雙手按下座面兩側
4. 最後將椅背的兩邊扶手拉起，直至發出「咔」一聲代表鎖定



02 使用說明

電池說明

充電方法

如為電池充電

1. 打開右扶手蓋，拿著電池的手抽位置，依照正確方向拿出電池
2. 取出時，留意扶手尾端有一條黑色拉桿
3. 取出或放入電池時，先拉出拉桿再進行操作，避免卡住電池
4. 然後從輪椅的左扶手盒裡拿出充電線，插入電池的接駁位置



如直接於輪椅充電

1. 打開左扶手蓋，拿出充電線
2. 再接上扶手裡的輪椅電源接駁位置進行充電



電量顯示燈 - 輪椅有兩個位置可以檢查電量

右扶手 電池盒

- ① 打開右扶手蓋，按下介面上的電池圖案
- ② 旁邊會有四盞電量燈
- ③ 燈亮數量愈少代表電量愈少，如所有燈都亮起則代表已充滿電



右手手柄 的電源界面

- ① 分別有紅、黃、綠三盞燈，插入車鑰匙啟動後
- ② 如所有燈都亮起代表輪椅現時有足夠電量
- ③ 如紅燈出現閃爍則代表電量不足，會隨時停止電動助推功能



電池使用注意事項

1. 電池蓋(即扶手蓋)應長期蓋好，亦不應放置任何物品在內
2. 應小心保管電池，避免碰撞及接觸金屬片等導電物，以免令電池受損
3. 閒置時，應盡量把電池安放於電池盒內
4. 電量會自然流失，故重新使用前請先進行充電，避免出現電力不足
5. 如發現電池有損壞，切勿使用

02 使用說明

指示燈說明

椅背扶手兩邊均設有
操作指示燈



如輪椅出現故障，左扶手
後方的大透明燈會亮起，
按下便可關掉



插入車匙，**向右扭**啟用電動助推模式
相反，**向左扭**代表關閉電助推模式
輪椅仍然可以透過手動推動



啟動後，**綠燈**亦會同時亮起



如發現**紅燈**亮起，代表輪椅上的重
量不足10kg，故系統不能使用電動
助推功能

03 使用方法

安全剎車系統

1



確保已啟用電動助推模式，
電源充足，輪椅運作正常

2



手柄兩邊的剎車裝置都是向上
掀起，並會於停止時自動鎖定

3



推動時雙手需連同剎車裝置同時
握緊，代表解除鎖定可以推動

4



如要暫停使用，可先慢慢減速，
待輪椅停下後，再鬆開剎車裝置

電動助推系統



按下的幅度愈大，電動助推力愈強；
按下的幅度愈小，電動助推力愈微

! 照顧者如使用太強的電動助推力或
助力突然變化太大，可能會因輪椅的
急速前進或停下而造成危險。

推動時，如需使用電動助推功能，可同
時慢慢按下右邊手柄旁下方的操作桿

03 使用方法

速度調節



如需調節電動助推的最大速度

1. 可打開左扶手蓋
2. 會有一枚帶有灰色線的小圓鈕
3. 順時針扭動是加速，逆時針扭動則是減速

向後行駛



1. 向後行駛時，可先按下右邊手柄旁的「R」鍵
2. 系統會發出3下「嘟嘟嘟」的聲響
3. 左扶手後的紅色燈會持續閃爍，即可向後移動
4. 如需返回向前走模式，再按一次「R」鍵即可


轉彎



1. 行駛時如遇上轉彎位置，可先慢慢停下
2. 雙手不用鬆開手柄，依照需要轉的方向
3. 按住該方向手柄底部的綠色小按鈕，轉彎後放開按鈕即可

03 使用方法

防傾倒系統

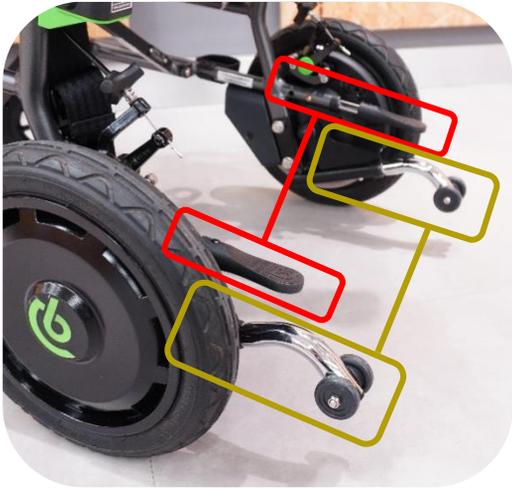

- 輪椅後轆中間設有 **防傾桿** 及 **後傾桿**
- **後傾桿** 設有固定鈕調較長度
- **防傾桿** 則設可調較方向

! 留意當前轆離開地面時，左扶手後的指示界面會亮起紅燈，代表電動助推功能停止

睡眠模式



當輪椅閒置30分鐘後，系統會自動進入睡眠模式，屆時如繼續使用，可先利用車鑰匙關掉重新再開動

使用注意事項

- ✓ 使用前應注意電源連接有否鬆脫
- ✓ 使用時應雙手緊握手柄，避免輪椅控制不穩
- ✓ 同時手掌應直接接觸把手，避免配戴物件如：手套、毛巾等覆蓋手柄，以免影響操作。



04 注意事項

- ▶ 輪椅的最大承重量為**100kg**，每次只可載一位使用者
- ▶ 由於輪椅配合電池使用，應避免接近水份，或於手濕的情況下操作
- ▶ 使用前，應檢查輪椅配件或剎車系統等有否破損，以免影響操作
- ▶ 留意啟動時有否異常聲音，電量是否充足，確保器材可正常運作
- ▶ 如剎車系統卡住未能正常操作，請勿強行壓下，否則會造成損壞
- ▶ 請勿在斜度太大的坡道、濕滑、有沙石或路面凹凸不平的情況下使用
- ▶ 此輪椅只可作行動輔助用途，請勿當作其他運輸器材使用

05 清潔及保養

- 如操作界面有污漬或水份，可使用質感較柔軟的布，如：眼鏡布、螢幕擦拭布等輕輕擦拭
- 操作界面以外部份可使用已扭乾水的濕布進行清潔
- 如有嚴重污漬亦可配合中性清潔劑清潔，再抹乾
- 請勿使用其他清潔劑、酒精、精油、天拿水等溶劑進行清潔
- 存放時應放置於平坦穩妥的地方，避免擺放於高處，濕滑，長期曝曬或接近火源的地方

****實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動電動助推輪椅 - YP，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

🖨 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片



9

