



賽馬會家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心  
Gerontechnology Education and Rental Service Centre

# 折疊式電動輪椅

## QR

折疊式電動輪椅-QR

### 01 器材介紹




- 電動輪椅可為使用者提供電動行動輔助，協助維持正常社交活動，減輕照顧者負擔
- 座椅採用透氣又柔軟的物料，讓使用者乘坐時更舒適涼快
- 活動式扶手設計，方便使用者轉移
- 使用方法簡易，只需透過操作桿控制前後方向
- 輪椅前後均具有避震系統，更採用實心輪胎，行駛時更穩定
- 充電8小時可持續行駛近50公里
- 輪椅具有人手推動模式，方便於沒有供電的情況亦可轉換人手推動
- 輪椅體積較細，可直接摺疊，方便於不同空間使用或存放

## 02 使用說明


## 模式轉換桿

輪椅後輪下方兩邊均設有模式轉換桿：

- 如選用**電動模式**，請把轉換桿向上剔起

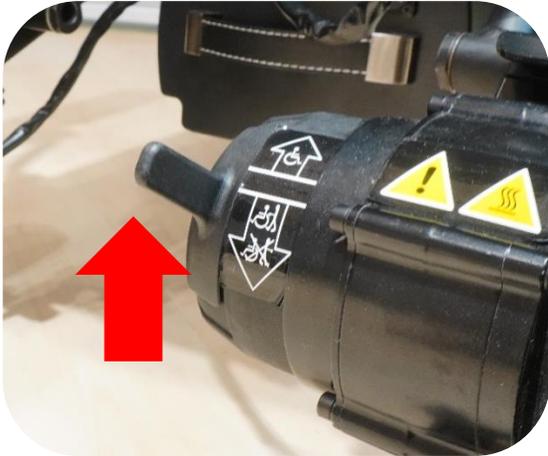


- 如選用**手動推動模式**，請把轉換桿向下踏

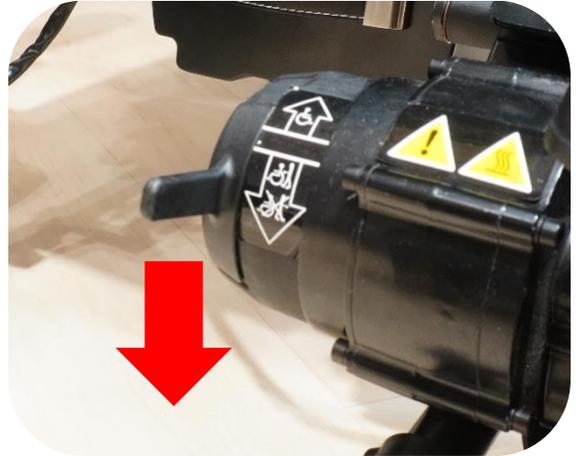

## 活動式扶手 – 解除鎖定扶手

- 兩邊扶手外側均有一枚鎖定桿
- 把鎖定桿往下扭，即可解除鎖定，將扶手向後翻
- 相反，把鎖定桿往上扭，則可鎖定扶手

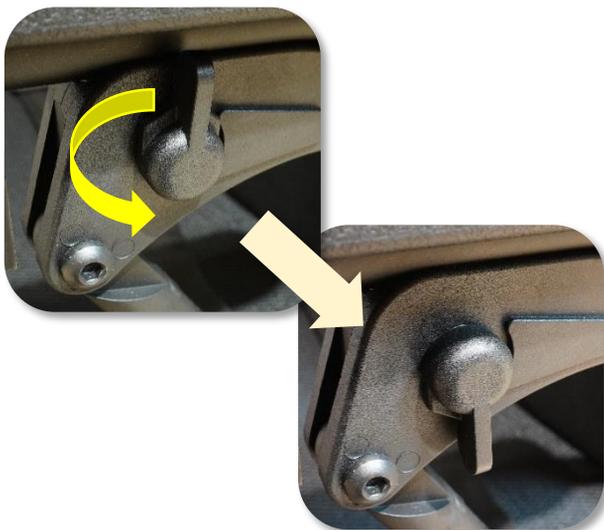

## 02 使用說明

## 控制界面- 設於右扶手位置

控制界面上設有操作桿、開關鍵、電量顯示燈及速度調較按鈕

## 電量顯示燈

- 顯示位置共有5顆小燈(2顆綠色、2顆橙色、1顆紅色)
- 如紅燈出現閃爍等於電量較低，需要充電

## 開關鍵

- 開啟及關閉電源時，只需按一下按鈕即可
- 如停止使用或轉用人手推動模式時，應先關閉電源

## 喇叭

- 只需按一下按鈕即可發出提示音

## 速度調較按鈕

- 輪椅共有5種速度可以調較
- 大閃電圖案代表加速；小閃電圖案代表減速
- 顯示燈愈少等於速度愈慢，反之亦然

## 操作桿



操作桿只需人手操控，透過自主控制前後左右，鬆開手時，輪椅便會跟隨停止

## 02 使用說明

## 充電方法 - 輪椅上有兩個充電位置

## 1. 右扶手的控制界面下方



## 2. 座椅下的電池



- ① 先從控制界面關掉電源
- ② 將專用充電線的圓形插頭插入所選擇的充電孔
- ③ 另一邊則接上電源

如充電器上顯示紅燈代表正在充電，如顯示綠燈即完成充電  
最佳充電時間為6-8小時，切勿超過連續充電時間，避免發生意外



## 電池使用注意事項

- ▶ 電池蓋應該長期蓋好
- ▶ 如發現電池或電線有損壞，切勿使用
- ▶ 應小心保管電池，避免碰撞及接觸金屬片等導電物，以免令電池受損或引起其他危險情況
- ▶ 因電量會自然流失，故重新使用前請先進行充電，避免使用時出現電力不足

# 03 安裝方法

## 開合方法

### 摺疊方法



1. 先將腳踏向上收起



2. 解除椅背下方中間的鎖定扣



3. 確保後轆兩邊的轉換桿處於電動模式

\*即已向上提起，同時亦代表已鎖定後轆



4. 站於椅背後方，雙手捉緊把手，稍為用力把椅背往前方向下壓

\*摺疊前，要先確保輪椅前方沒有阻礙物



5. 保持捉緊把手，將整個椅背向下壓至貼住座椅



6. 一隻手握著腳踏的把手，另一隻手扶穩椅背的把手



7. 雙手同時將輪椅從平放，拉起至垂直



8. 直至防傾桿的助行轆及椅背的助行轆都已貼地

\*提起時，記緊雙手不要向外鬆開，要保持向內施力



9. 利用椅背的把手即可移動輪椅

## 開合方法

**展開方法** - 展開時需要較大力量，最佳開啟程序建議由兩人操作



1. 確保後轆兩邊的轉換桿處於電動模式



2. 將輪椅平放於地上



3. 雙手緊握把手，然後用力將椅背往上拉起



4. 保持捉緊把手，分階段用力逐漸將椅背拉至最盡

\*如力量不足，可用腳踏住前轆的支架借力



5. 確保椅背的助行轆已緊貼底架



6. 扣好椅背下方中間的鎖定扣，鎖定車身



7. 最後放好腳踏即可使用

## 04 注意事項

- 輪椅的最大承重量為100kg，每次只供一位使用者使用
- 由於此輪椅配合電池使用，使用過程當中，應避免接近水份，或於手濕的情況上操作
- 使用前，留意輪椅配件或剎車系統等有否破損，以免影響操作
- 留意啟動時有否異常聲音，電量是否充足，確保器材可正常運作
- 請勿在斜度太大的坡道、濕滑、下雨、有沙石或路面凹凸不平的情況下使用
- 此輪椅只可作行動輔助用途，請勿當作其他運輸器材使用

## 05 清潔及保養

- 如操作界面有污漬或水份，可使用質感較柔軟的布，如：眼鏡、螢幕擦拭布等輕輕擦乾
- 操作界面以外部份可使用已扭乾水的濕布進行清潔
- 如有嚴重污漬亦可使用中性清潔劑清潔，再抹乾
- 請勿使用其他清潔劑、酒精、精油、天拿水等溶劑進行清潔。
- 存放時應放置於平坦穩妥的地方，避免擺放於高處，潮濕，長期曝曬或接近火源的地方

**\*\*實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動折疊式電動輪椅 QR，如有疑問，請向中心職員查詢\*\***

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

🖨 3153 5250

✉ [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片



