



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心  
Geronteck Education and Rental Service Centre

# 特別功能輪椅 (高背傾斜及後躺)

## - MG

### 01 器材介紹



## 01 器材介紹

- 扶手的高度，座位和腳踏的角度均可調較，方便進行轉移及適合不同身高人士使用
- 設有包圍式背墊及頭枕，提升安坐時舒適度
- 座墊設計前高後低，防止使用者臀部向前滑動，有助維持穩定坐姿
- 腳踏式鎖車系統讓照顧者更容易控制和安全地推行輪椅
- 輪椅折疊後輕盈小巧，方便存放和輕鬆進出狹窄的地方

## 02 使用說明

### 剎車掣

- 剎車掣設於輪椅手柄下方

如需減速，可慢慢同時握著兩邊的剎車掣，鬆手則可解除



! 剎車是為了減慢速度，並不等於鎖車

### 鎖車掣

手動鎖車掣(輪椅兩側)



將兩側的鎖車掣向後拉至最盡，即可鎖緊車輪

腳踏式鎖車掣(椅背下方)




踏下輪椅底後方兩邊黃色鎖車掣，即可鎖緊車輪

## 02 使用說明

## 腳部承托

## 拆卸方法


1. 先將腿墊向外翻，再將腳踏板向上收起
2. 按實腳踏支架旁的固定鎖，往外撥開並提走腳部承托

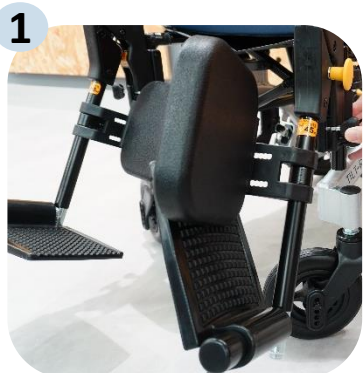

\*如需安裝回腳踏，可進行相反步驟，內撥回腳部承托至最盡即可\*

## 調較上抬角度

1. 直接用手將腳踏支架往上推，即可上抬腳踏角度
2. 下降時，照顧者先一隻手扶好使用者小腿，另一手拉起支架旁的黃色拉桿，腳托便會下降

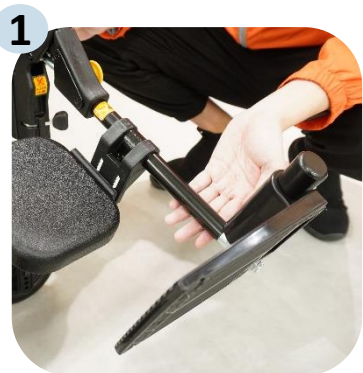

## 頸枕

1. 頸枕後方設有黃色拉桿
2. 逆時針方向拉動黃色拉桿即可調較頸枕角度
3. 調較完成後，將拉桿順時針轉回原位即可鎖定





## 02 使用說明

## 扶手

- 扶手設有9段高度可供調較

1. 先將扶手底部的黃色扶手鎖向上提起，以解除鎖定
2. 調較扶手高度至合適位置，再按下黃色扶手鎖
3. 輕力按下扶手至聽到”咔”一聲，確保扶手已完全鎖定

1



2



3



\*如發現扶手的高度不合適，建議聯絡中心職員協助

## 防傾倒設計

- 輪椅後轆底部設有防傾桿及後傾桿，兩者均有環型勾扣鎖定
- 後傾桿有 2 段長度調較
- 防傾桿則有 3 段長度及方向可供調較



## 長度調較



1. 先用手指貼近勾扣邊緣位置，再用力量向上提起



2. 然後再將勾扣拉出即解鎖，可向前或後推動防傾桿作調較



3. 對準插孔將勾扣插回，再按下勾扣至緊貼支架即完成

## 摺疊輪椅



1 先用鎖車掣鎖定輪椅，拆下座墊及背墊



2 將兩邊腿墊向外翻，再收起腳踏



3 按住腳踏支架旁的黑色固定鎖，將腳踏支架往外撥



4 然後逆時針扭鬆椅背後的兩個旋鈕，把頸枕及其承托架拆卸



5 把後轆及椅背後的橫向固定桿向上托起



6 雙手前後握住座面中間位置，再向上拉至最盡



7 然後將兩邊扶手盡量向內推



8 再按下兩邊手柄下方的黃色摺疊鎖



9 最後，扶住椅背往下摺疊即可完成

**\*開啟輪椅只需按照摺疊的步驟次序相反即可\***



## 03 使用方法

### 功能1 - 整體傾斜

輪椅設有整體傾斜功能，  
能整體後傾約30度



1. 先鎖定輪椅



2. 右手手柄旁設有鮮黃色傾斜手掣



3. 同時握緊兩邊手柄及黃色傾斜手掣即可將輪椅往後傾斜



## 03 使用方法

### 功能2 - 椅背後傾

輪椅亦設有後躺功能，  
椅背能後躺約125度



1. 先鎖定輪椅



2. 輪椅左手手柄旁設有灰色後躺手掣



3. 同時握緊兩邊手柄及灰色後躺手掣即可將椅背往後躺



## 04 注意事項

- 輪椅的最大承重量為**100kg**，每次只可承載一位使用者
- 使用輪椅時切勿將重心向前傾，  
避免翻倒造成危險
- 應避免在凹凸不平的地面下使用
- 離開或於固定位置使用時，請確保已鎖定輪椅
- 請確保在已安裝頭枕的情況下使用輪椅，如需拆卸請先向專業人士查詢
- 如長時間閒置，使用前請先檢查輪椅配件或剎車系統等有否破損，以免影響操作
- 此輪椅只可作行動輔助用途，請勿當作其他運輸器材使用



## 05 清潔及保養

- 清潔時可使用已扭乾水的濕布進行清潔
- 如有嚴重污漬亦可使用中性清潔劑清潔，再抹乾
- 請勿使用其他清潔劑、酒精或天拿水等溶劑進行清潔
- 請避免存放於潮濕、長期曝曬或接近火源的地方

**\*\*實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動特別功能輪椅(高背傾斜及後躺)-MG，如有疑問，請向中心職員查詢\*\***

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252      🖨 3153 5250

✉ [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片

