



賽馬會a家


Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務
Gerontechnology Education and Rental Service

醫療護理超低床



01 器材介紹

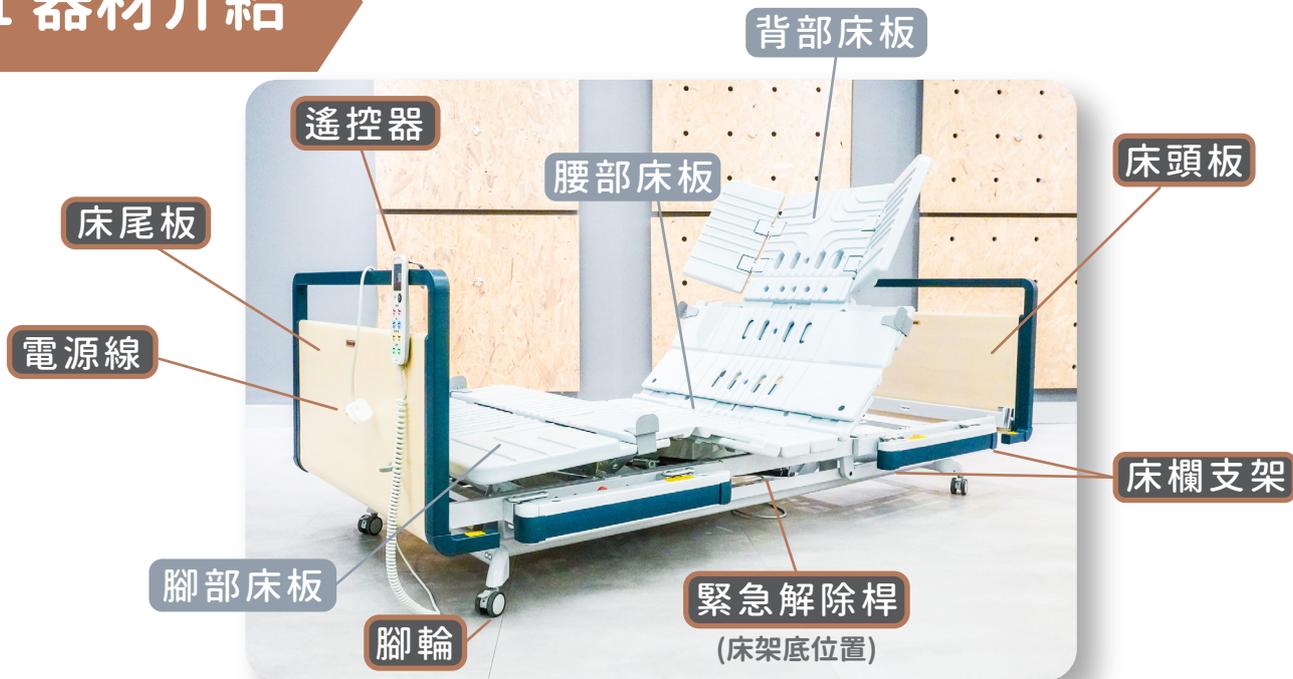

02 使用說明 手動遙控器

❖ 遙控器共有1個螢幕，9個操作按鍵和2種指示燈，使用遙控器來進行各個位置的升降



螢幕會顯示護理床各部分的角度，於螢幕上方亦會顯示解鎖及已連接電源的圖示

背部升降



方便使用者坐起身和進食

背部升到合適的位置，頭部左右兩側會抬起，有助穩定坐姿

腳部升降



配合背部上升，更有助穩定使用者坐姿

有助防止身體向下滑

背部腳部同時升降



一鍵升起背部和腳部，方便使用者坐起身

兩者之間的內角會自動保持在110度以上

床架高度



64cm 可以作出升降調較
25cm

方便使用者進行轉移及照顧者進行護理



操作指示燈：

進行操作時會亮燈



上鎖指示燈：

在遙控器處於上鎖狀態時操作便會亮燈

安全開關



遙控器背部有安全開關，將轉換把手插入五角形洞內



把箭嘴方向轉至 ，遙控器便無法操作



把箭嘴方向轉至 ，便可禁止調節床架高度



把箭嘴方向轉至 ，遙控器便可正常操作

注意



- ❖ 請勿用力拉扯或壓住電源線及遙控器連接線，以免損壞



- ❖ 操作時，避免利用指甲或尖銳的物品按壓及同時按下多個操作鍵，以免破損



- ❖ 不使用遙控器時，應長按電源鍵直至上鎖的圖案出現，並懸掛在床尾、床頭板或床欄外側，避免誤按及導致損壞

- ❖ 切勿把遙控器交由無法正確使用之人士操作，應謹慎操作避免發生事故

03 使用時注意



遙控器靜止40秒後會自動上鎖。如需繼續操作，唯有長按電源鍵才可解鎖並開啟遙控器



如果要從床上離開或進行轉移時，請將護理床上升至適合起身之高度



- ❖ 於休息和睡眠期間或當照顧者要離開無法自行操作護理床的使用者時，應根據使用者狀況，盡量將床板回復水平，建議將護理床的高度調較至最低，以減低從床上跌倒受傷風險

手動調節頭板



- ❖ 當背板升至合適位置時，以手動方式調節頭板至垂直位置，便可承托使用者頭部面向前方

步驟

❖ 建議由兩位或以上照顧者協助操作



建議把背板升至約30-50度



一位照顧者照顧使用者



另一位提起頭板至最高點，然後向下拉連接杆至最盡



放下頭板，確保連接杆固定在凹位中

回復頭板



提起頭板至最高點，向上拉連接杆至最盡



放下頭板，便可回復頭板

回復護理床原來位置





❖ 長按床架升降的上下兩個按鍵，床的各個部份便會下降，角度為0，床架高度為25厘米

緊急解除桿



- ❖ 由床尾向床頭方向望，床架左側底部位置設有兩支解除桿
- ❖ 因停電或故障而導致背或腳板部份無法升降時，可透過轉動**緊急解除桿**使其**回復至水平位置**

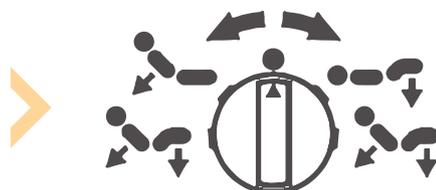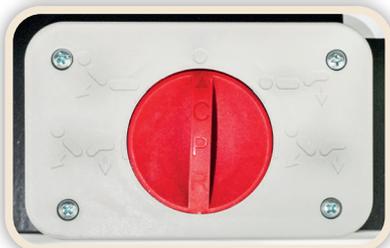


注意:緊急解除桿**無法**回復床架高度

步驟



建議由兩位或以上照顧者協助操作

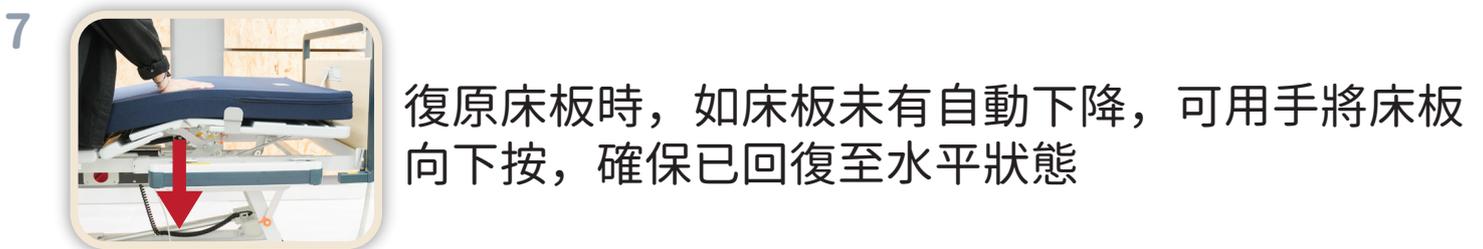

注意

- ❖ 緊急解除桿只可於停電或床架故障的情況下，作緊急停止運作及回復用途，使用前需先拔走電源
- ❖ 使用前應先確認使用者安全再操作，慎防因床板急速降落而受傷
- ❖ 根據不同的床板角度，轉動時或需使用更大力量



- ❖ 使用後，床板的實際角度和遙控器顯示的角度會有偏差。請在恢復電源後用遙控器把床板的角度降到0度，之後才繼續操作

04 注意事項

- ❖ 護理床上使用者的最大承重量為135kg，連附屬品(如:床欄、床褥)總承重量為170kg
- ❖ 護理床電源插頭請直接使用插座，避免使用拖板
- ❖ 連續操作2分鐘後，摩打可能會過熱。請待摩打冷卻最少2分鐘後才操作，以免發生故障
- ❖ 於護理床上使用電子醫療設備時，請先拔掉電源以免受到干擾
- ❖ 護理床有區分頭或腳板部份，應留意正確的使用方向和卧床姿勢，避免因不當使用而受傷
- ❖ 切勿在護理床上跳躍或作階梯使用
- ❖ 應確保護理床週邊及底部沒有擺放物品和電線，以免影響運作或電線損毀，造成意外
- ❖ 小心肢體、衣物、電源線或其他週邊物品卡進床板與床架之間的縫隙中，以免受傷及造成損壞
- ❖ 如有一段時間不使用護理床，請將背板和腳板放置水平，床調至最低位置和將電源拔掉
- ❖ 請勿於護理床附近使用暖風機等加熱儀器，否則有機會導致護理床變形或火災等危險



移動護理床時

- ❖ 移動護理床時，應先將床欄裝上，盡量由兩位或以上人士操作，以免推行過程中發生意外
- ❖ 移動護理床時亦必須先拔走電源插頭，將電源及遙控器電源線繞好後再操作
- ❖ 毋需移動護理床時需鎖上床輪，以免護理床再滑動
- ❖ 請勿把護理床放置於太陽直射、濕度太高、低溫、乾燥或不平坦的位置上



檢查及保養

❖ 使用前可先檢查各個動作，確保運作暢順。如：

動作運行時有否噪音

各功能動作能否運作

腳輪是否能夠鎖定或解除

電源線及遙控器連接線是否連接妥當

遙控器畫面和燈光是否亮起

- ❖ 應定期檢查床架、床板、床欄、電線及插頭等有否破損或變形
- ❖ 如發現各個零件有鬆脫情況或安裝後出現問題，應盡快通知中心職員，請勿自行修理，切勿繼續使用

05 清潔及保養

- ❖ 如需清潔，可使用乾燥柔軟的抹布擦拭床架
- ❖ 請勿使用具揮發性的清潔劑，會導致床架變色及變質
- ❖ 如發現頑固污漬，可用濕布及中性清潔劑擦拭，再徹底擦乾，否則可能會導致零件破損
- ❖ 如需用濕布清潔時，應先拔掉電源插頭，避免觸電
- ❖ 避免電源插頭上粘附灰塵，請定期拔掉電源插頭，用乾布擦拭

06 特別功能床褥 器材介紹



床墊套抗菌、可清洗



床墊設有硬身長邊緣，能穩定使用者坐在床邊的坐姿，方便借力上落床

床墊的緩衝海綿可舒緩和分散使用者坐下時的壓力

使用說明



床頭部分由2層海綿組成



床墊標籤的一側為床尾，床墊圖案的表示方向為正面



此床墊可配合醫療護理超低床 MFB 使用



請確保床墊固定在床板上的床墊固定架內

不需要在床墊上下方另加床墊，以免影響床墊和護理床功能

清潔及保養

- ❖ 請使用已稀釋的中性清潔劑清潔，擰乾毛巾/抹布水分後才擦拭
- ❖ 請勿使用酒精消毒

注意事項

- ❖ 請勿撕掉床墊標籤，以免破壞床墊套表層
- ❖ 請勿站在床墊上及在床墊上擺放重物，以免床墊變形



實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動醫療護理超低床及特別功能床褥，如有疑問，請向中心職員查詢

07 聯絡資訊

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252 ☎ 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號舖

觀看說明影片

