


特別功能床褥 KE

01器材介紹





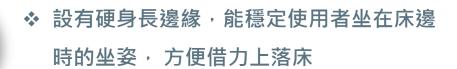



❖ 於床墊中間的高密度海綿,在升起背部時 ,能固定使用者的臀部和坐姿



❖ 設有可伸展及滑動海綿層,分別有助分 散和減少身體承受的壓力及減低床墊與 皮膚的摩擦,預防壓瘡

02 使用說明



床墊的藍色部 分是正面, 白 色圖案的一側 為床尾



請確保床墊固 定在床板上 的 床墊固定架內

- 不需要在床垫上下方另加床垫,以免影響床墊和護理床功能
- 此床墊可配合醫療護理超低床KO使用

02 注意事項

- 請勿撕掉床墊標籤,以免破壞床墊套表層
- 請勿站在床墊上及在床墊上擺放重物, 以免床墊變形



03 清潔及保養

- 請勿拆除床墊套
- 請使用已稀釋的中性清潔劑清潔,擰乾毛巾/抹布水分後才擦拭
- 如需消毒,可用消毒酒精

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力,使用者請勿自行 改動特別功能床褥KE,如有疑問,請向中心職員查詢

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

3153 5252



A 3153 5250

ersc@ageathome.hk

新界沙田小瀝源牛皮沙街2號偷翠商場M樓2號舖