



賽馬會a家


Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Gerontechnology Education and Rental Service Centre

特別功能床褥 RH

特別功能床褥 - RH

01 器材介紹

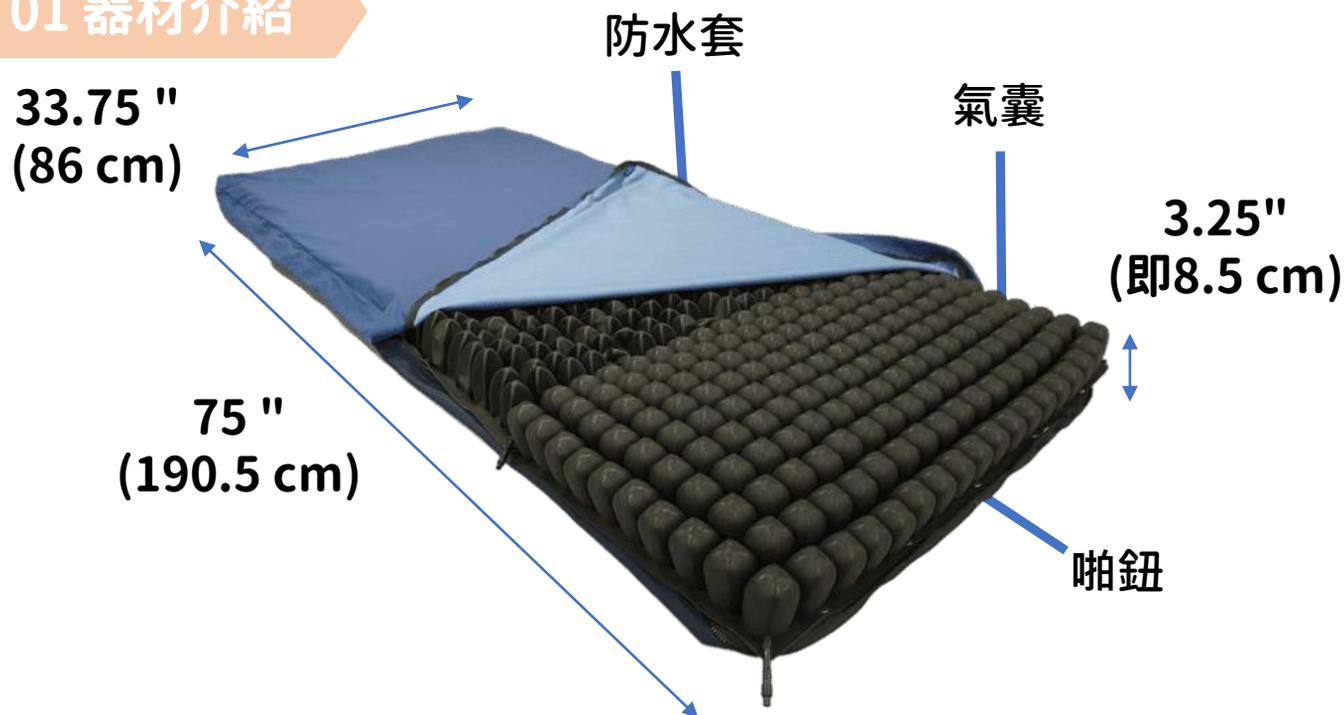

- 此減壓床墊由多個氣囊組成，可提供穩定的睡姿承托，有助分散和減少身體承受的壓力，預防壓瘡形成或惡化
- 可跟據使用者需要改動氣囊，調節睡姿承托
- 床墊不需要外部電源
- 床墊底層的排水孔可讓汗液排出，保持身體乾爽
- 易於清潔



02 使用方法

- 攤開來放置在床，腳印圖案為床尾
- 防水套後有固定帶，可將固定帶綁在床板上
- 床墊上不可多於一個床單或床套



03 注意事項

- 請勿在床墊上方另加額外承托物品，以免影響床墊功能
- 請勿撕掉床墊標籤，以免破壞床墊表層
- 請勿用力拉扯充氣管
- 請勿自行為氣囊放氣或充氣
- 定期檢查氣囊是否有漏氣，如發現漏氣請向中心職員聯繫



04 清潔及保養

- 可使用中性清潔劑擦拭防水套和氣囊，如需消毒，可用1:9漂白水擦拭，然後使用沾上清水的布擦拭，再待其風乾
- 防水套可使用洗衣機以60度以下的水和中性清潔劑清洗，並將其風乾

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能床褥RH，如有疑問，請向中心職員查詢

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

☎ 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖