



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

電動床褥 – LM

電動床褥 – LM

01 器材介紹



- 電動床褥可放置於不同床架上使用，適合應用於不同環境
- 床褥邊緣設有加強承托，減少因承托不足而產生的床緣下陷現象
- 床褥可透過控制器調較背部或腳部獨立升降，同時升降亦可操作，方便坐立或轉移
- 電池及線路接駁位置可收藏於專用床套內，外表與一般床褥無異

02 使用說明

手動控制器



02 使用說明

背部升降

可調節背部床板的角
度，方便使用者坐立
和進食



腳部升降

可協助使用者保持
穩定坐姿



背及腳部同步升降

可以同時進行背部及
腳部升降，同樣方便
使用者坐立、進食或
轉移



02 使用說明

使用注意事項

- 床褥有區分頭尾部份，應留意正確的使用方向和卧床姿勢，避免因不當使用而受傷
- 如需由敞卧至坐起時，建議把背、腳部稍為同時升起，方便保持姿勢



- 閒置時，建議將床褥調較回水平位置
- 當照顧者需要離開無法自行操作床褥的使用者時，應根據狀況，把床褥回復水平，確保安全



- 需要從床上離開或進行轉移時，建議將床褥上升至適合起身之高度
- 切勿在床褥上跳躍或搖晃，避免失衡

03 注意事項

- 移動床褥時請先拔走電源插頭，將電源及遙控器電源線繞好後再操作。
- 使用前可先檢查各個動作，確保運作暢順。如：
 - 電源線及遙控器連接線是否連接妥當
 - 各功能動作能否運作
 - 動作運行時有否噪音
- 請勿把床褥放置於太陽直射、濕度太高、低溫、乾燥或不平坦的位置上



04 清潔及保養

- ▶ 如床單或床套有污漬，可放入洗衣機清洗
- ▶ 如清潔簡易污漬，可使用已扭乾水的濕布擦拭該位置
- ▶ 如發現頑固污漬，可先嘗試用中性清潔劑擦拭，再徹底抹乾，否則請聯絡中心職員協助

****實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動電動床褥，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252 🖨 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號舖

觀看說明影片

