



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre


特別功能床褥 DF

特別功能床褥 – DF

01 器材介紹



- 床墊由不同大小的海綿組成，可提供穩定的睡姿承托，有助分散和減少身體承受的壓力，預防壓瘡形成或惡化
- 上半部海綿組件比下半部寬
- 床的邊緣設有硬身長邊,承托力較高，有助使用者穩定地坐在床邊，方便借力及安全地上落床
- 底部有防滑、防水設計
- (長) 198cm x (闊h) 88cm x (高) 15cm

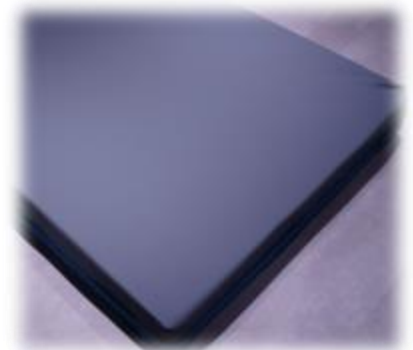

02 使用說明



- 床墊套上有雙腳圖案的位置屬床尾部份
- 請確保防水套完全覆蓋床墊，並且拉鍊已完全閉合

03 注意事項

- 床墊的最大承重量為254kg
- 請勿在床墊上下另加額外承托物品，以免影響床墊功能
- 請勿在床墊上擺放重物，防止床墊變形
- 請小心使用轉移板，避免損壞床緣或床墊套
- 應定期檢查床褥有否破損或變形，如有發現請向中心職員查詢

04 清潔及保養

- 清潔時請使用已扭乾水的濕布擦拭
- 如需清潔頑固污漬，可考慮使用中性清潔劑擦拭
- 防水套可使用洗衣機以低溫清洗，並將其晾乾

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能床褥 DF，如有疑問，請向中心職員查詢

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心



3153 5252



3153 5250



ersc@ageathome.hk



新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖