



賽馬會a家


Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心  
Geronteck Education and Rental Service Centre

# 特別功能床褥 MA

特別功能床褥 - MA

## 01 器材介紹

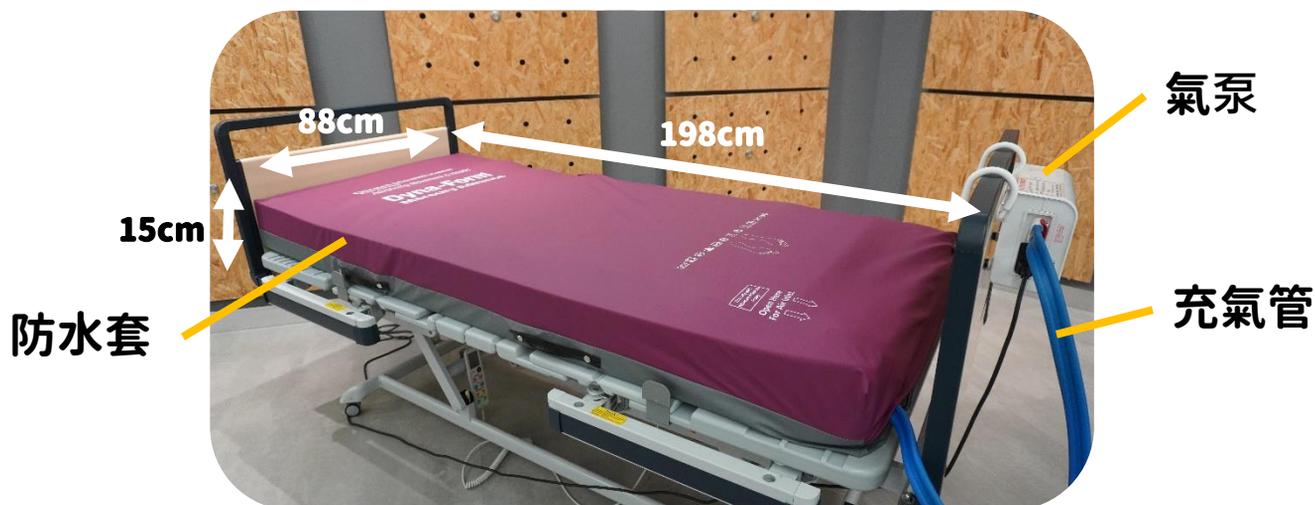

- 此床墊由多個氣囊和海綿組成，可提供穩定的睡姿承托，有助分散和減少身體承受的壓力，預防壓瘡形成或惡化
- 簡單改動床墊設定便可調節個人化睡姿承托
- 床墊提供頭及肩膀的承托



## 02 安裝方法

腳圖案為床褥尾端，將氣泵掛在床尾




打開防水套，將緊急解除掣從床尾取出



將氣泵接上電源線和緊急解除掣



按下電源線上方的電源開關啟動氣泵

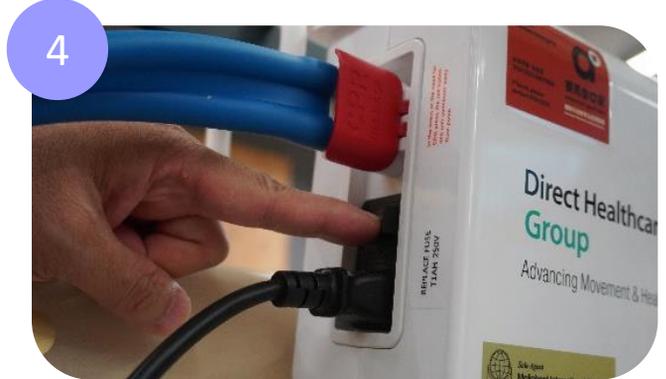


然後，氣泵上方的2盞綠色顯示燈會同時閃爍



幾分鐘後，當只有「LOW」顯示燈亮起，代表充氣完成，氣囊會間隔地充氣

6

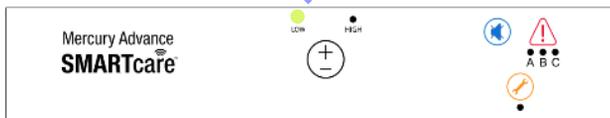

7



8



最後，確保床墊完全覆蓋。閉合拉鍊時，小心夾到充氣管，以免影響充氣


如職業治療師建議使用高氣壓模式，請按下設定鍵以轉換

「HIGH」顯示燈亮起，代表轉換完成

9



10

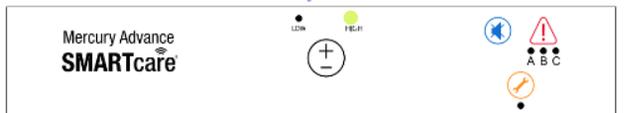

11



所有氣囊都被完全充氣後，代表充氣完成

### 03 注意事項

- 床墊的最大承重量為254kg
- 床墊電源插頭請直接使用插座，避免使用拖板
- 請勿在床墊上下方另加額外承托物品，以免影響床墊功能
- 請勿在床墊上擺放重物，以免床墊變形
- 請勿撕掉床墊標籤或拉扯充氣管，以免破壞床墊表層




- 如長時間不使用氣泵，可將電源拔掉，並不會影響氣墊的充氣狀況
- 請勿阻擋控制器後的排氣口和按壓輸氣管，床墊將無法正常充氣



## 03 注意事項

- 如出現警報聲，可先按下藍色喇叭鍵  使警報靜音，或按下控制器左側開關掣2次以解除警報
- 然後，如果發現警報圖案  或工具圖案  下方亮起告示燈，可先參考氣泵上的指示操作。如仍再出現警報聲，並亮起告示燈，請立即與中心職員聯絡。

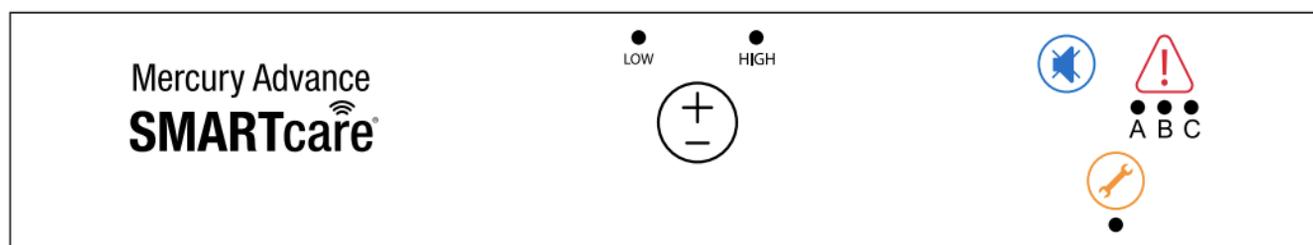

## 04 清潔及保養

清潔前請先將床墊連結控制器的插頭拆去

- 可使用沾上中性清潔劑的布擦拭防水套和控制器，然後使用沾上清水的布擦拭，待其晾乾
- 請定期檢查床墊有否磨損

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能床褥MA，如有疑問，請向中心職員查詢

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

 3153 5252  3153 5250

 [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖