



賽馬會a家
Jockey Club | age at home
樂齡科技教育及租賃服務中心
Gerontech Education and Rental Service Centre

特別功能床褥 - SM

特別功能床褥 - SM

01 器材介紹



❖ (長) 181cm x (闊) 91cm x (高) 12cm


❖ 床褥由高透氣性、高密度緩衝彈簧及人造纖維物料組成

❖ 高密度緩衝性彈簧能更有效承受人體壓力，以提高床褥耐用性，防止睡姿塌陷

❖ 床的邊緣較堅挺，有助使用者穩定地於床邊安坐或上落

人造纖維物料

彈簧

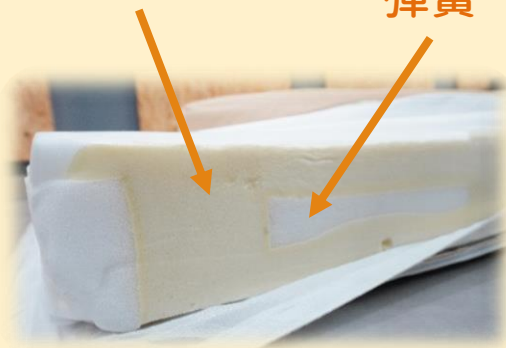

02 使用說明



- ❖ 請確保床褥套完全覆蓋床褥，拉鍊亦需完全閉合

03 注意事項



- ❖ 請勿在床褥上擺放尖銳物品及撕掉床褥標籤，以免破壞床褥結構
- ❖ 切勿將床褥擺放於不平坦、長期曝曬或潮濕的地方
- ❖ 請勿在床墊上下另加額外承托物品，以免影響床墊功能

04 清潔及保養

- ▶ 床套如有污漬，可使用洗衣機以低溫清洗，並將其晾乾
- ▶ 如需清潔床褥上的簡易污漬，可使用已扭乾水的濕布擦拭該位置
- ▶ 如發現頑固污漬，可先嘗試用中性清潔劑擦拭，再徹底抹乾
- ▶ 如發現床褥出現破損或變形，請向中心職員聯絡

實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動特別功能床褥 - SM，如有疑問，請向中心職員查詢

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252 📠 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖