



賽馬會a家
Jockey Club | age at home


樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

特別功能床褥 GT

特別功能床褥 - GT

01 器材介紹


(高) 16cm

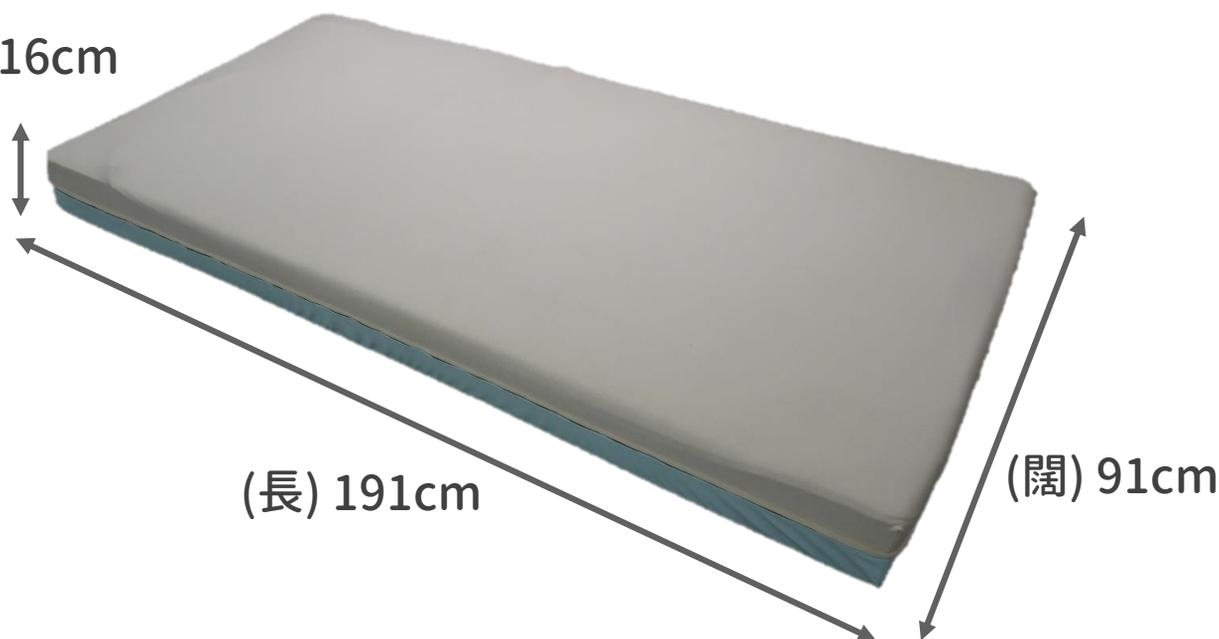

(長) 191cm

(闊) 91cm

- 床褥內部採用組合式設計，主要由三組啫喱凝膠組成
- 凝膠具有不同軟硬程度，分佈於頭部、腰部和腿部，配合不同人士需要

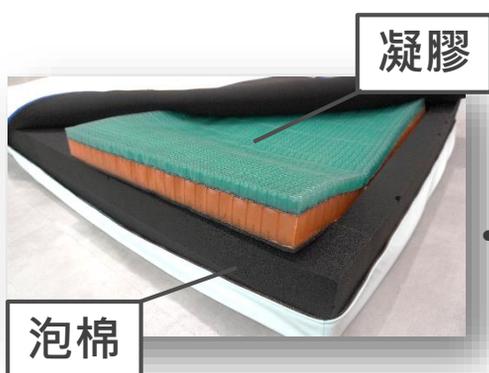


凝膠具高緩衝性及透氣性，有助分散和減少身體承受的壓力，預防壓瘡形成或惡化

- 凝膠外圍亦有具高透氣性的泡棉包圍住，有助支撐凝膠形狀變化

02 使用注意事項

- 床褥套採用雙面設計，一面具有防水功能，另一面則是伸縮性針織表面，使用者可根據治療師建議使用合適床面
- 請確保床墊套完全覆蓋床墊，並且拉鍊已完全閉合

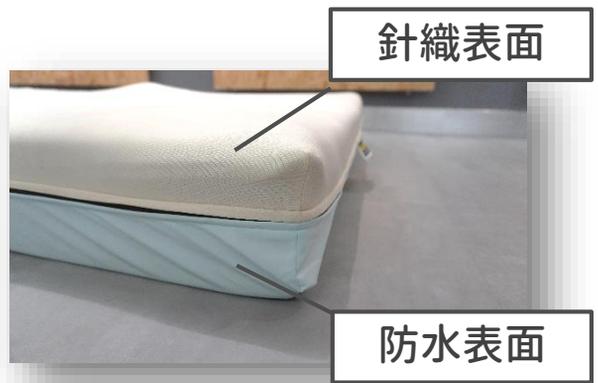

03 注意事項

- 請勿在床褥上擺放尖銳物品及撕掉床褥標籤，以免破壞床褥
- 盡量不要將床褥擺放於不平坦的地方以及在陽光下直接照射
- 定期檢查床褥內部軟膠有否破損或變形，如有發現請向中心職員查詢



04 清潔及保養

- 請使用已扭乾水的濕布擦拭床褥套及內部凝膠
- 如需清潔床褥套頑固污漬，可使用中性清潔劑擦拭
- 如需清潔床褥內部凝膠頑固污漬，可直接將凝膠拆除並用清水沖洗，去除殘留水分後讓其放平晾乾

****實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能床褥GT，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252 🖨 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖