



賽馬會家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

多用途扶手



01 器材介紹



- ✓ 結合扶手及摺椅功能，靈活配合使用者不同需要
- ✓ 扶手設於金屬底座上，安全穩固，無需鑽牆或安裝，並可按需要放置於不同地方作使用
- ✓ 此扶手椅可協助使用者進行不同身體轉移活動，椅背亦設有不同高度橫向扶手，迎合使用者不同需要
- ✓ 此扶手椅整體高度亦可調校

02 安裝方法

打開和收起摺椅時

1



拉起橙色安全扣，然後便可打開或收起座椅

2



在完全打開或收起後，鬆開橙色安全扣，摺椅便能固定在開啟或收起的狀態

由坐姿轉為站立

1



將扶手椅設於合適位置，從梳化站立前，先用手按著扶手位置

2



把身體重心稍微前傾，然後手部向下用力，並緩緩站立

由卧床轉為坐時

1



張開近床邊那側手，並握著座椅較遠的把手位置，即大概與身體張開60度角。

2



握著扶手借力，把身體轉側。

並將雙腳沿床邊放下。

3



按著扶手並向下推，慢慢把身體撐起，至坐起。

落台階時



- ▶ 用同一側手握著摺椅的扶手位置
- ▶ 另一側的腳踏前一級
- ▶ 待身體保持平穩後，把另一隻腳踏下

03 注意事項及保養



▶ 切勿自行拆卸、改裝或維修組件，以免影響所需功能而發生危險。如發現器材有問題，可以與相關職員聯絡。

▶ 使用者必須站於**器材金屬底座面積較多的一側**。否則有機會傾倒並引起危險。

▶ 開關座椅前，需**留意手部擺放位置**，以免夾傷。

▶ 清潔時，請使用溫和或中性洗滌劑，以免令器材變質或損壞。



****實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動多用途扶手，如有疑問，請向中心職員查詢****

請向中心職員查詢，如有疑問，請向中心職員查詢**

04 聯絡資訊

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

☎ 3153 5250

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號舖

