



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

電動輔助助行器



01 器材介紹



- 協助下肢力量或平衡力較弱的使用者，在平地行走或上斜時提供合適的動力，落斜時亦可產生阻力，令使用者更安全穩定地自助步行
- 助行器具自動剎車系統，右手離開把手時會自動剎車，停止滑動，加倍安全
- 助行器中間設有坐墊，讓使用者於有需要時亦可坐下歇息
- 高度亦可作出調較，方便不同人士使用

02 安裝方法

打開車身



1 握住把手，向左右兩側拉開




2 雙手按下座面兩側
要注意不要夾到手指和衣物



3 最後再確認車身及坐墊已完全打開

折疊車身

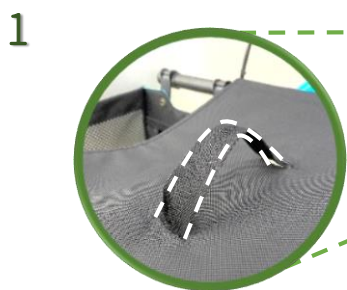

1 一隻手握住把手，另一隻手提起座面上的手環，慢慢用力向中間拉起



2 握住兩邊把手向中間推

操作界面

電池餘量顯示




電源

1. 按一下[電源]掣啟動助行器，操作界面會顯示電池餘量
2. 接通電源後，電池餘量燈會閃爍約2秒，助行器會自動檢查機器有否異常，屆時請勿觸摸把手

- ✓ 稍微長按[電源]掣可以關閉助行器，電池餘量顯示亦會熄滅
- ✓ 持續5分鐘沒有操作時，會自動切換至電源關閉狀態。如需繼續使用，需再次開啟[電源]掣

充電方法

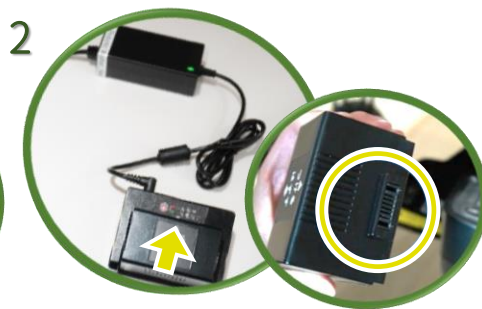

打開電池盒蓋板，
打橫拉出電池

接上電源，將電池對準電極
頭向內放入充電盒

紅燈表示「充電中」
綠燈代表「完成充電」



充電完成後，把電池放回機身電池盒
並蓋回頂蓋板

充電約3小時便可
完成充電!

充電注意事項

- ❖ 如使用時電池收納盒發熱或充電時電源線發熱均屬正常現象
- ❖ 電池蓋需長期蓋好
- ❖ 電池盒上不應放置任何物品
- ❖ 請小心保管電池，電池接頭要避免碰撞及接觸金屬片等導電物，以免令電池受損或引起冒煙、起火等危險情況
- ❖ 如發現電池有損壞，切勿使用
- ❖ 長時間閒置時，請務必1個月進行一次充電

03 使用說明

作助行器使用



按一下[電源]掣，待電池餘量燈暫停閃爍後握緊把手




先檢查好扶手及剎車掣沒有鬆脫



握住把手時，助力系統會自動運行，可朝前方緩慢步行



上下斜坡時，系統會自動控制助力

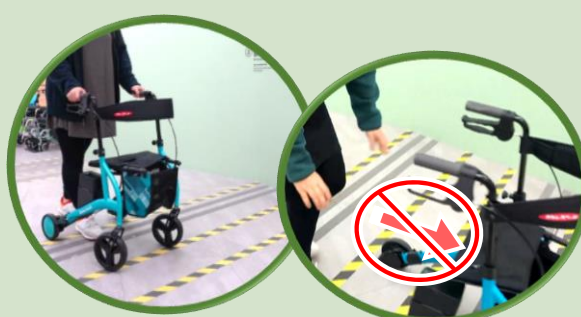

手部不小心離開把手，自動剎車系統亦會令助行器停止運行，確保安全

作坐椅使用



1. 先慢慢停穩，助力系統會自動停止
2. 將剎車手柄用力向下按，鎖實輪椅
3. 坐下時需緩緩進行，坐下後背部亦不要完全依靠靠帶，以免傾倒

上石壘用



1. 將助行器盡量推近石壘
2. 雙手握緊手柄，用腳踩下後車輪旁的階梯踏板，將前輪升起，並越過石壘
3. 用力提高手柄及前推，令後輪滾上石壘
4. 跨越石壘後，請將助行器放平



請勿嘗試越過過高的石壘!

04 注意事項

- ❖ 感應位置只設於右側把手，使用時右手必須緊握右邊把手
- ❖ 手掌應直接接觸把手，避免配戴物件如：手套、毛巾等覆蓋把手，以免影響感應
- ❖ 請勿在斜度太大的坡道、濕滑、有沙石或路面凹凸不平的情況下使用
- ❖ 未插入電池或電量不足時，內置剎車系統會暫停，會造成翻倒或撞車
- ❖ 助行器停下時，必須同時鎖上兩邊的剎車掣
- ❖ 接通電源後，請勿操作車身展開、折疊、提起或調節把手等動作
- ❖ 收納袋可承重最多為5kg
- ❖ 不要懸掛物件於助行器把手上，以免翻側
- ❖ 請盡量避免在雨天使用，並確保電池盒蓋板蓋好



05 清潔及保養

- 如操作界面有污漬或水份，可使用質感較柔軟的布，如：眼鏡、螢幕擦拭布等輕輕擦乾
- 操作界面以外部份可使用已扭乾水的濕布進行清潔
- 如有嚴重污漬亦可使用中性清潔劑清潔，再抹乾
- 請勿使用其他清潔劑、酒精、精油、天拿水等溶劑進行清潔

****實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動電動輔助助行器，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心



3153 5252



3153 5250



ersc@ageathome.hk



新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號舖

觀看說明影片

