

作助行器使用

提示模式

助行器共設有3種提示功能，可進行不同配搭使用：

激光提示線模式

助行器會在後車輪中間投射鮮明的綠線，引領使用者每步前行的踏腳位置


震動模式

兩邊的手柄會震動，指引使用者前行的節奏

聲音模式

助行器會有節奏地發出聲音，指引使用者每步行走的節奏

操作界面

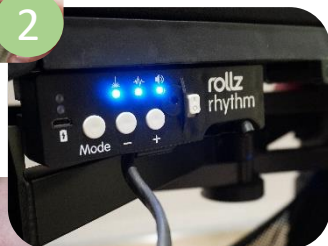

- 1 操作界面位於座面左下方，將開關掣向上推以開啟
- 2 請按照職業治療師的建議，按「Mode」按鈕來選擇不同提示模式，藍燈亮起代表已完成選擇
- 3 按下其中一邊手柄上方的灰色按鈕以啟動提示模式，再按一下便可關閉

作輪椅使用

1 使用鎖車掣鎖定助行器

2 除下背帶

3 分別把兩邊手柄固定鎖往逆時針方向轉3個圈，再把手柄往外轉向後，並按職業治療師的建議調校手柄高度，最後鎖緊手柄固定鎖



4 拉起手提包的紅色鎖定桿，並將手提包套入助行器內側的凹位，按下紅色鎖定桿

5 握著手提包的握位向前進，用力拉起，再向後拉，直至手提包兩邊的銀色固定鈕完全套入支架兩側的軌道中

6 從手提包中取出腳踏，以45度角，從上而下套入助行器前轆的腳架位置，放平腳踏

轉換成助行器使用

基本上轉換方式剛好與轉換輪椅時完全相反



繫上背帶時，
背帶標籤面向前方

1. 收起腳踏

2. 折疊椅背

6. 轉換完成

3. 取出手提包

5. 繫上背帶

4. 把手柄轉向前方