




賽馬會a家
Jockey Club | age at home
樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

減壓坐墊 GT


減壓坐墊 GT

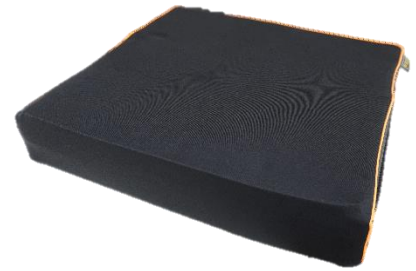

01 器材介紹

2.2cm 啫哩凝膠

坐墊套

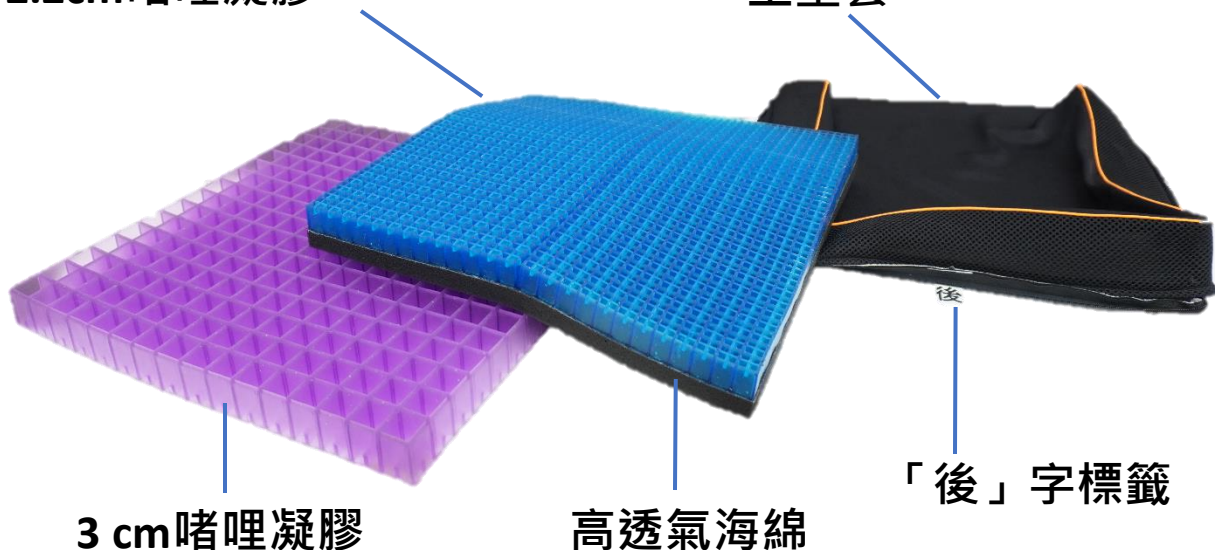

3 cm 啫哩凝膠


高透氣海綿

「後」字標籤


- 減壓坐墊由耐用啫哩物料製成，提供穩定的坐姿承托，穩定用家臀部在輪椅上的位置，減少滑動的風險，防止姿勢塌陷
- 啫哩物料亦有助分散和減少身體承受的壓力，減輕皮膚和肌肉的負擔
- 坐墊透氣的設計可有助保持舒適溫度及濕度，預防壓瘡形成或惡化
- 坐墊的正面和背面屬不同的軟硬度，背面較柔軟，正面較堅挺，可配合使用者不同需要



表面

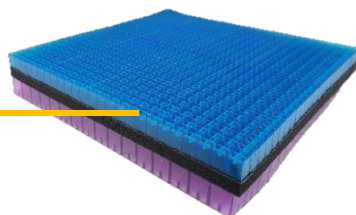

背面

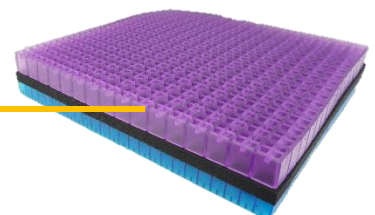

- 黑色彈性布面配橙色邊為正面
- 防滑布面配拉鏈邊為背面，座墊亦帶一個「後」字標籤作提示


表面
(採用防水絲滑布料)

背面
(採用防滑磨砂布料、
具有後字標籤)




- 可根據喜好放置坐墊表面（硬）或背面（軟）

表面(硬)

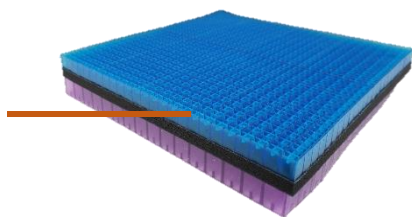

背面(軟)

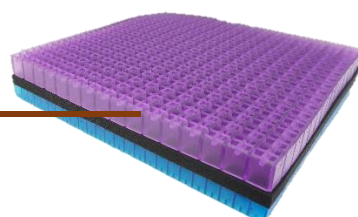

- 如果想坐較軟的，可將坐墊背面向上擺放；較硬，可將坐墊表面向上擺放
- 最後，檢查雙腿是否穩固而舒適地放在坐墊上，腳踏高度合適。




03 注意事項

- 藍色啫哩坐墊中間設有摺疊位置，而非損毀或變形




- 請勿撕掉坐墊標籤，以免破壞坐墊表層

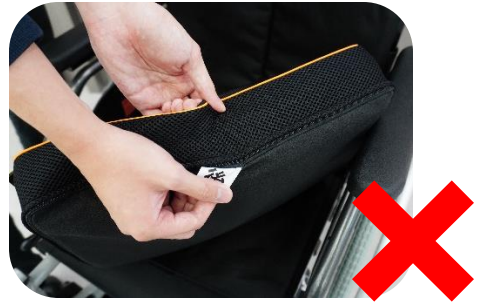

- 請勿於坐墊上方額外擺放物品，以免影響坐墊功能或變形



- 如果坐墊長時間在受力狀態下彎曲、斷裂或懸掛，可能會導致變形或裂開

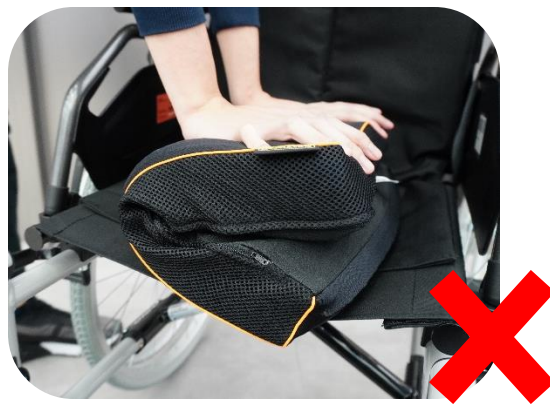

- 應盡量平放，避免擺放於濕滑，長期曝曬或接近火源的位置

請定期檢查坐墊有否開裂、變形或有不明液體流出！

04 清潔及保養

- ▶ 清潔前，請先去除可見的灰塵、頭髮等再進行清洗
- ▶ 坐墊套、紫色啫哩凝膠、藍色啫哩凝膠連海綿均可使用中性清潔劑清潔
- ▶ 如使用洗衣機，可用不超過30°C的水溫配合中速清洗
- ▶ 清洗後，用毛巾等擦去清洗後殘留的水分，放平晾乾
- ▶ 應盡量將坐墊套、紫色啫哩凝膠、藍色啫哩凝膠連海綿獨立清洗
- ▶ 切勿漂白、烘乾、熨燙及乾洗
- ▶ 晾乾後把坐墊套套回坐墊上，黑色彈性布面朝上，即坐墊正面



應定期檢查坐墊有否裂開、變形或有溶解物流出

實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動減壓坐墊 GT，如有疑問，請向中心職員查詢

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

☎ 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片

