



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Gerontechnology Education and Rental Service Centre

座廁起立輔助器

IA

座廁起立輔助器 - IA

01 器材介紹

- 座廁起立輔助器可以協助下肢力量較弱或站立不穩的使用者，更安全地於座廁安坐及站立
- 扶手採用活動式設計，方便轉移
- 增加座廁高度，讓使用者更容易安坐和站立
- 無需鑽牆安裝，適合不同環境使用



02 使用方法



1. 坐下前，先把接近身體的一側扶手掀起，待使用者坐穩後，再將扶手重新放下



2. 使用時便可以握着扶手借力

03 注意事項

- ◆ 座廁起立輔助器的最大承重量為150 kg
- ◆ 掀起扶手時，需留意座廁起立輔助器附近或周圍有否存放雜物，以免造成意外
- ◆ 放下扶手時要注意避免夾到身體各部位，以免受傷
- ◆ 閒置時扶手應保持放平狀態，以便隨時使用
- ◆ 使用前，確保已穩固地安裝在座廁板上
- ◆ 請勿將物品掛於扶手及連接支架上，以免影響操作
- ◆ 如發現座廁板與座廁出現鬆脫狀況，請與中心職員聯絡
- ◆ 座廁起立輔助器只可於如廁時使用，切勿用作其他用途



04 清潔及保養

- 清潔時，可使用清水擦拭，再用乾布抹乾
- 如發現頑固污漬，可用中性清潔劑擦拭，再徹底抹乾



****實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動座廁起立輔助器 IA，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252 🖨 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片

