

01 器材介紹

22"後轆款式

手推環



16"後轆款式



- 輪椅分別有16"和22"的後轆選擇，適合不同人士需要
- 設有活動式扶手及腳踏，方便使用者進行轉移
- 設有腳踏板高度旋鈕，毋須額外工具即可簡單調節腳踏板高度
- 可伸縮鎖車掣，方便照顧者及使用者輕鬆鎖車，方便轉移及過床

02 使用說明


- 需要自行推動的人士可選用22"後轆款式，使用者於推行時可以利用手推環行駛
- 由照顧者推動的人士亦可選用22"後轆款式，可減輕照顧者推動時的負擔。如需考慮存放空間，則可選用16"後轆款式，以節省存放位置



02 使用說明

鎖車掣

- 後轆兩側設有鎖車掣，停止行駛時必須鎖定輪椅
- 鎖車掣手柄的長度可供調較，按需要上下移動手柄即可

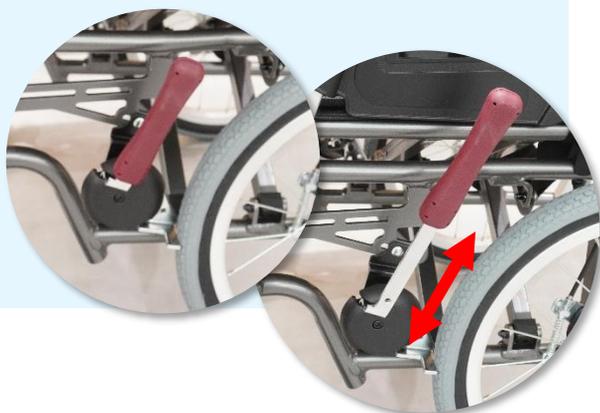

扶手

▶ 使用方法

1. 提起扶手時，握住扶手後方的手環，再向後提起即可
2. 相反，把扶手放下，直至發出「咔」一聲代表已還原



▶ 調較扶手高度

先向上別起扶手鎖，調較至所需高度後，再上下微調，聽到「咔」一聲代表扶手已鎖定



*扶手高度已經由職業治療師評估及調校，如發現扶手高度改變，建議聯絡中心職員協助

02 使用說明

開合方法

打開

先用鎖車掣鎖定輪椅，
站在輪椅其中一側

按著座面左右兩側向
下推，直至座面下的
支架緊貼車架

手柄將椅背往上翻至最
盡，聽到「咔」一聲，
代表已鎖定



***注意：請勿將手放置於固定鎖旁，以免夾傷**

設有儲物袋的背墊為
背面，兩面均需對準
椅背上的魔術貼貼好

有花紋的座面朝上，
坐墊底部及其中三邊
均設有一條魔術貼

坐墊底部對準座面，
三邊的魔術貼向下貼
於座椅底



對準扶手下方的接
駁口插入腳踏

握住腳踏鎖定桿，將
腳踏向內推

確保已鎖定，再放下
腳踏板



02 使用說明

開合方法

摺疊

- 1 先用鎖車掣鎖定輪椅，再收起腳踏



- 2 握住腳踏鎖定桿，然後把腳踏向外翻即可拆除腳踏



- 3 然後拆除背墊和坐墊



- 4 再握住座面前後向上提起至最盡



- 5 將兩邊扶手向內推



- 6 手柄下方兩邊均設有固定鎖，按下並把椅背往後摺疊



03 注意事項

- ▶ 輪椅最大的承重量為 100kg，每次只可承載一位使用者
- ▶ 儲物袋可放置不重於1kg的物件
- ▶ 使用時，使用者或照顧者均切勿以單手操作輪椅，避免造成意外
- ▶ 使用前，應先檢查配件有否鬆脫，有否出現異常聲響，如有發現請停止使用及通知中心職員
- ▶ 暫停使用或上落輪椅時必須鎖好車轆，起立時亦應先翻起腳踏板



04 清潔及保養

- 可使用已扭乾水的濕布進行清潔
- 如有頑固污漬可配合中性清潔劑擦拭，再讓其自然晾乾
- 請勿使用其他含腐蝕性的清潔劑、漂白水等進行清潔
- 存放時請避免放置於潮濕、長期曝曬或接近火源的地方

****實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動有手剎手推輪椅 - MC，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

☎ 3153 5250

✉ ersc@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片





賽馬會 a 家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心

Gerontech Education and Rental Service Centre