



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心  
Geronteck Education and Rental Service Centre

# 特別功能床褥 UF

特別功能床褥 - UF

## 01 器材介紹



· 床墊套防水、快乾、抗菌

· 床墊設有波浪形海綿內層，有效承托睡眠姿勢及分散身體承受的壓力，預防壓瘡

## 02 使用說明



床墊可雙面使用，不分床頭床尾



此床墊可配合翻身減壓醫療護理床 FBN 使用



❖ 請確保床墊固定在床板上的床墊固定架內

不需要在床墊上下方另加床墊，以免影響床墊和護理床功能

# 特別功能床褥 UF

特別功能床褥 - UF

## 02 注意事項

- ❖ 請勿拆除床墊套
- ❖ 請勿清洗和漂白，如需清潔，請使用清水，擰乾毛巾/抹布水分後才擦拭



## 03 清潔及保養

- ❖ 請勿撕掉床墊標籤，以免破壞床墊套表層
- ❖ 請勿站在床墊上及在床墊上擺放重物，以免床墊變形



\*\*實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能床褥 - UF，如有疑問，請向中心職員查詢\*\*

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252      🖨 3153 5250

✉ [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖