



賽馬會家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心  
Gerontechnology Education and Rental Service Centre

可傾斜淋浴椅 - OC

# 可傾斜淋浴椅 - OC


## 01 器材介紹



- 可傾斜淋浴椅具有兩種功能，可作淋浴椅及便椅使用
- 讓使用者於淋浴時可保持坐姿或需要如廁時使用，減低跌倒風險
- 淋浴椅的後傾角度可供調較，以應付不同情況需要
- 更配備頭枕及活動式扶手，方便轉移，加強承托及舒適度
- 設有把手及可上鎖車輪，移動時可更安全
- 腳踏板及腳蹠帶可以幫助承托雙腳，避免因被拖行而受傷
- 座椅設有U型開口位置，方便使用者於浴椅上如廁
- 浴椅下亦裝有可拆式便盆，方便照顧者清潔及保持衛生
- 淋浴椅後方亦設有防傾桿，避免因操作不當而引致後翻情況出現

## 02 使用說明

## 頭枕

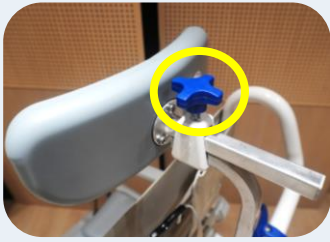

- 頭枕的高度及深度均可調較
- 透過手柄中間的兩顆旋鈕扭鬆再調節即可



## 活動式扶手



- 扶手可自由調整幅度，收起時只需往後推至最盡即可固定

## 車輪

浴椅共有4枚車輪：

- 3枚紅色車輪，踏下時代表鎖定浴椅
- 1枚藍色車輪，於轉換方向時使用，讓照顧者更容易轉彎，踏下時只會垂直固定單一方向，不能作鎖車之用



## 調整腳踏高度



1. 先將腳踏支架的藍色鎖定環拉出
2. 然後按照所需高度上下調整腳踏支架
3. 對準高度孔，並將藍色的鎖定環重新套入即可

## 腳踏板

- 直接將踏板向前或向後調較，即可形成不同斜度

## 02 使用說明

## 調較後傾角度



浴椅共設有25種斜度可供調較,方法如下:

1. 椅背後手柄位置設有一枚藍色的握式手掣
2. 鎖上車轆, 確保使用者扣好安全帶並穩妥坐好
3. 一隻手扶穩手柄, 一隻手捉緊藍色手掣
4. 然後慢慢地將輪椅往後傾斜至所需斜度
5. 先放開藍色手掣, 確保浴椅已停止移動即可



如需將浴椅復位, 可參照以上步驟, 先一隻手扶穩手柄, 另一隻手握緊藍色手掣, 慢慢地將浴椅向上扶起即可。

**\*注意:** 一旦握住藍色手掣, 椅背可能會快速向後傾斜, 故應確保椅背的空間充足, 照顧者已捉緊手柄並能夠承托使用者之重量, 才開始進行操作, 以免受傷。

## 03 使用方法

## 作淋浴椅使用



1. 鎖上車轆, 將離床較近的扶手提起, 使用者手握較遠一方扶手作支撐



2. 站起, 然後慢慢轉移至淋浴便椅上, 再確保使用者坐穩



3. 放下扶手, 確保使用者雙臂保持於扶手內, 以確安全



4. 將雙腳放置於腳踏板上, 並確保腳踭帶有承托起腳踭



5. 解鎖車轆, 移動淋浴椅至淋浴位置



6. 鎖好車轆即可進行清潔



## 03 使用方法

### 作便椅使用

如需進行如廁，只需先依照同樣的轉移方式至浴椅，

於使用前放置好便盆



移動淋浴椅至座廁位置對準套入



或

再鎖好車轆即可使用。

## 04 注意事項

- ▶ 可傾斜淋浴椅最大承重為150kg
- ▶ 升起或降下扶手時，要避免夾到
- ▶ 調較淋浴椅前，先確認使用者已穩妥坐好及雙腳放置於腳踏板上
- ▶ 開始移動前，確保移動路線及淋浴椅底部沒有阻礙物，以免影響操作
- ▶ 使用時切勿將重心向前傾或站於腳踏板上，以免翻倒
- ▶ 調較後傾角度時，照顧者應保持足夠距離，以免後傾時撞到

## 05 清潔及保養

- 一般清潔時，可使用清水沖洗
- 如發現頑固污漬，可使用已扭乾水的濕布或海綿輔以中性清潔劑進行清潔
- 如需清潔管道或接駁位置，可使用柔軟刷毛擦拭，再沖洗
- 請勿使用其他含有腐蝕性或不明化學物的清潔劑進行清潔

**\*\*實際使用方法需要按照使用者的個別能力，使用者請勿自行改動可傾斜淋浴椅 - OC，如有疑問，請向中心職員查詢\*\***

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

☎ 3153 5250

✉ [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

觀看說明影片

