




賽馬會a家  
Jockey Club | age at home  
樂齡科技教育及租賃服務中心  
Gerontechnology Education and Rental Service Centre

# 特別功能床褥 SLD

特別功能床褥 – SLD

## 01 器材介紹

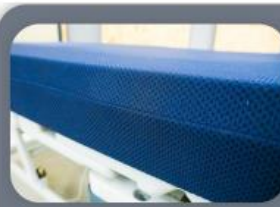

床墊套抗菌、  
可清洗



床墊設有硬身長邊緣，能穩定使用者坐在床邊的坐姿，方便借力上落床

床墊的緩衝海綿可舒緩和分散使用者坐下時的壓力

## 02 使用說明



床頭部分由2  
層海綿組成



床墊標籤的一側為床尾，床墊圖案的表示方向為正面



此床墊可配合  
醫療護理超低  
床 MFB使用



請確保床墊固  
定在床板上的  
床墊固定架內

不需要在床墊上下方另加床墊，以免影響床墊和護理床功能

# 特別功能床褥 SLD

特別功能床褥 – SLD

## 02 注意事項

- ❖ 請使用已稀釋的中性清潔劑清潔，擰乾毛巾/抹布水分後才擦拭
- ❖ 請勿使用酒精消毒

## 03 清潔及保養

- ❖ 請勿撕掉床墊標籤，以免破壞床墊套表層
- ❖ 請勿站在床墊上及在床墊上擺放重物，以免床墊變形



\*\*實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能床褥 – SLD，如有疑問，請向中心職員查詢\*\*

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252      🖨 3153 5250

✉ [ersc@ageathome.hk](mailto:ersc@ageathome.hk)

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖