

輔助餵食機

簡易說明



安裝方法



1. 放上托盤



2. 插入按鍵



選擇按鍵



餵食按鍵



3. 安裝匙羹

使用方法

設定餵食位置



1. 按下「設定鍵」



2. 按實「校準鍵」



3. 拉匙羹至嘴前



4. 按下「設定鍵」
(完成)

進行餵食



1. 選擇食物

2. 開始餵食

注意事項

- ⚠ 機械臂間歇性自動把食物碗裡的食物撥回中心位置，確保碗裡食物能完全被舀起
- ⚠ 請妥善安放餵食機於平坦乾爽的地方及避免機械臂受到碰撞，影響操作
- ⚠ 如所有指示燈同時閃動，則需要關閉10分鐘再重新啟動，若情況持續請告知相關職員

輔助餵食機

詳細說明



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

01 器材介紹



02 安裝方法



1 把黑色托盤按照機面上的坑紋放好



2 把白色食物分隔盤的弧邊靠內，放到黑色托盤上




3 按上按鍵



: 選擇按鍵插口



: 餵食按鍵插口

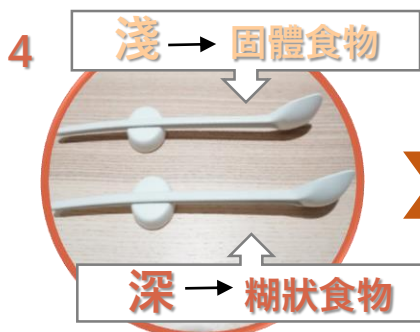

4 選擇合適深淺度的匙羹



5 將匙羹的磁石凹位對準機械臂前端凸位接合，匙羹需面向使用者

03 使用說明

機面上按鈕：

- ▶ **開關鍵**：按一下開啟電源，長按約2秒關閉電源
- ▶ **設定鍵**：按一下進入設定模式，以調較機械臂位置

機械臂上有一個按鈕：

- ▶ **校準鍵**：進入設定模式後，按實校準鍵調較機械臂至餵食位置

充電說明

- ▶ 「開關鍵」旁有5盞小燈代表電量，剩下1盞小燈時則需充電
- ▶ 電量顯示燈(緩慢地)閃爍代表電池正充電中，當5盞電量顯示燈全部亮起白燈，沒有閃爍，即完成充電

設定餵食位置

1 開啟電源
然後按一下
「設定鍵」



2 按實機械臂旁的
「校準鍵」



3 調較機械臂，
把匙羹移至使
用者嘴前
按一下亮著的
「設定鍵」，
設定完成！



4 機械臂便會自
動儲存當時位
置，隨後每次
餵食都會進行
同樣路線

5



如「設定鍵」的燈仍在閃爍，表示當下的餵食位置無法被儲存，需重新調較。請注意，餵食位置不能離開機身太遠。

04 使用方法



① 開啟電源後，機械臂會向使用者進行一個點頭的動作。

② 按一下左邊的「選擇鍵」，機械臂會以逆時針方向轉到下一格食物盤。



③ 按一下右邊的「餵食鍵」，機械臂會從食物盤中舀起食物，並跟隨設定路線移到餵食位置。

④ 按一下「餵食鍵」，機械臂會返回原位。



⑤ 若於餵送途中欲更改食物選擇，可連按兩下「餵食鍵」，機械臂便會把食物倒回原有的食物碗。

閒置2分鐘後，機械臂會擱在食物分隔盤的第一格食物盤上待機，

「開關鍵」仍會持續亮起白燈，觸碰任何按鍵即可繼續進行餵食。



閒置30分鐘後，輔助餵食機會自動關機。

05 注意事項




✓ 食物碗不設保溫功能，承載食物溫度不可超過100度

✓ 食物最合適為一粒花生至一粒藍莓的大小

✗ 份量不可超過食物碗的刻度指示

✗ 太高黏性、太長、太大的食物不適宜放入食物碗

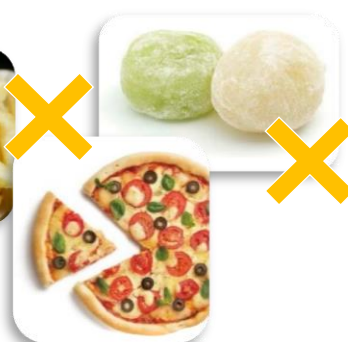

06 清潔及保養

- ❖ 黑色托盤、食物分隔盤及匙羹均可用日常洗潔精配合溫水進行清潔，更可放入洗碗機上層清洗
- ❖ 如需清潔基座及機械臂，亦可以使用濕紙巾或消毒紙巾清潔
- ❖ 請勿在基座和機械臂上直接使用任何液態清潔劑，避免損壞機器表面

****實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動輔助餵食機，如有疑問，請向中心職員查詢****

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

🖨 3153 5250

✉ info@ageathome.hk

📍 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號舖

觀看說明影片

